



THE
BEAUTY
VIBE



presenta:

LE VIBRAZIONI SELETTIVE FOCALI AD ARIA

Dalla medicina all'estetica avanzata



CHI SIAMO



- Siamo un Gruppo di Ingegneri, Manager e Medici con significativa esperienza pluriennale nei settori Medico, Estetico e Ortopedico.
- Abbiamo unito competenze, forze, conoscenze e passioni per creare una gamma di dispositivi medici unici.
- Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Svizzera e rispettano i più elevati standard di produzione e qualità.
- I nostri prodotti sono distribuiti in Europa da aziende selezionate che rispondono a requisiti per noi importanti, come la competenza ed il valore etico.



Ing. Claudia Bucci *Co-founder e Quality Manager*

Ingegnere Biomedico e responsabile qualità e sviluppo delle tecnologie medicali ed estetiche prodotte da *Do Well Technologies SA* e *AD Swiss Medtech SA*

Mi occupo del progetto Vibra dal 2010

COSA FACCIAMO:

Siamo specializzati in tecnologie non invasive ad alto valore di impatto terapeutico in:

- **ESTETICA PROFESSIONALE**
- **MEDICINA ESTETICA**
- **NEURO-RIABILITAZIONE**
- **FISIOTERAPIA**
- **MEDICINA SPORTIVA**



COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE



Politecnico di
Torino

[**LU:NEX**]

International University of
Health, Exercise & Sports

Università del
Lussemburgo



THE
BEAUTY
VIBE



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Scuola Normale
di **Pisa**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM

Università di
Birmingham



Università Cattolica
del Sacro Cuore di
Roma



CNR di **Chieti**

SUPSI

Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana



CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO
IRCCS MESSINA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



VIBRA BEAUTY: LE VIBRAZIONI AD ARIA
Dal mondo medicale all'estetica
professionale con una tecnologia brevettata
anche per l'estetica.

“Dispositivo per il trattamento non invasivo di patologie muscolari e neuromuscolari e supporto ai trattamenti estetici.”

Il brevetto è stato esteso in diversi paesi nel mondo.





IL NOSTRO ULTIMO
LAVORO:

The Beauty Vibe

La tecnologia più avanzata
degli ultimi anni per trattare

Inestetismi in modo sicuro e
naturale.

COSA SONO LE VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono movimenti oscillatori periodici di un corpo elastico o inelastico rispetto a una posizione di riferimento.

PARAMETRI DELLA VIBRAZIONE

FREQUENZA



Numero di spinte d'aria sulla cute in 1 sec.

INTENSITA'

Forza con la quale l'aria arriva sui tessuti.

TEMPO

Durata dell'applicazione

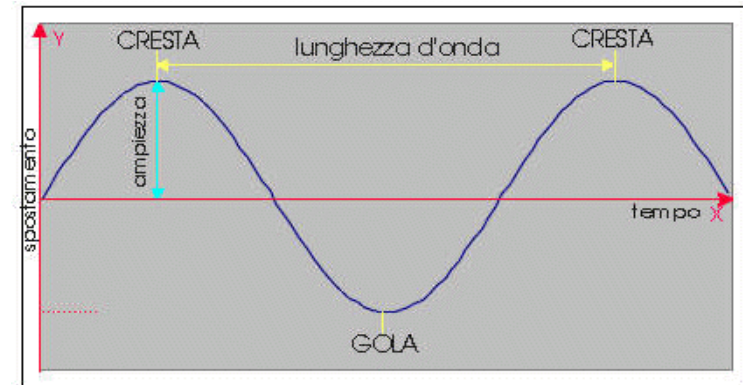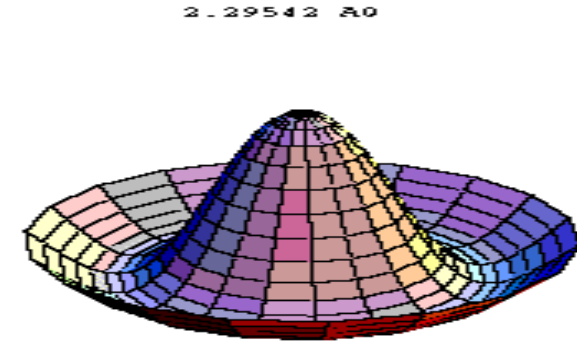

COME SI GENERA LA VIBRAZIONE



La vibrazione viene prodotta da una turbina che genera un flusso d'aria con uno speciale componente brevettato dalla nostra azienda.

REGOLAZIONE di flusso a camera singola a perdita zero
tecnologia Z.A.L - Zero Air Leack



La vibrazione viene incanalata in tubi e portata sulla cute attraverso trasduttori fissati con semplici bende elastiche.






PERCEZIONE DELLE VIBRAZIONI

La vibrazione viene percepita dai diversi sensori nervosi presenti nella cute e nei muscoli chiamati **MECCANORECETTORI**

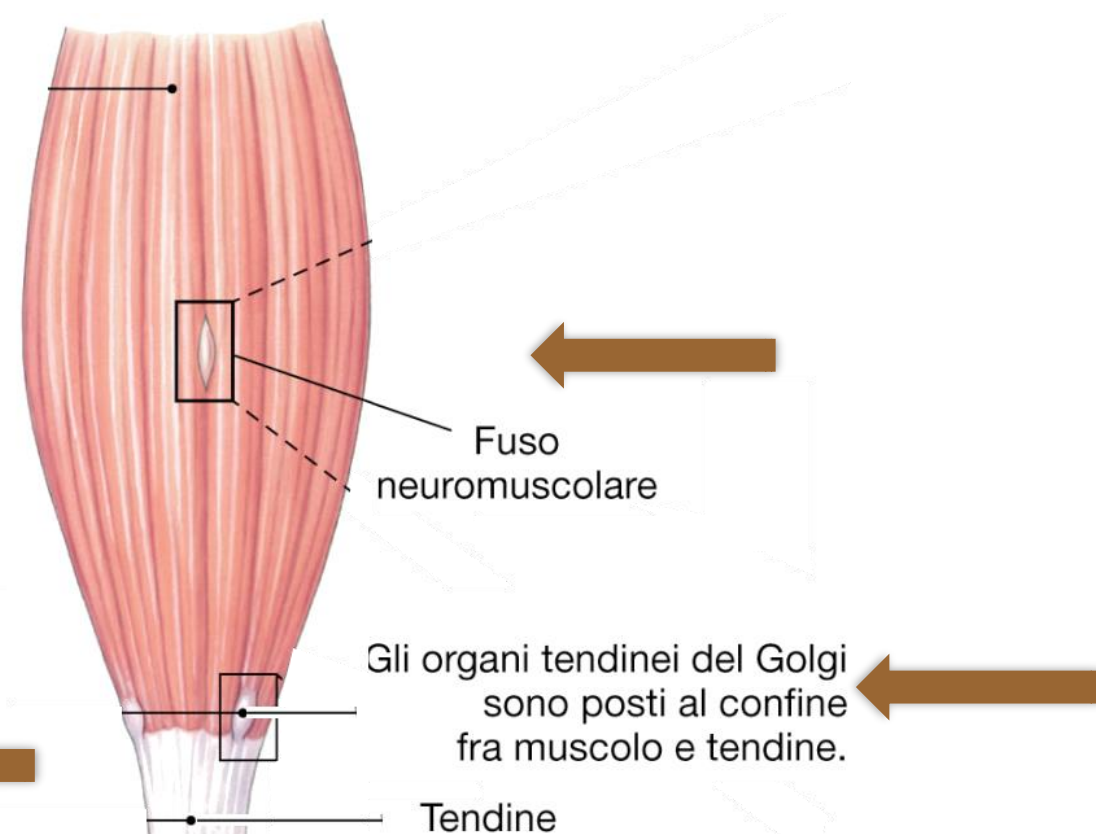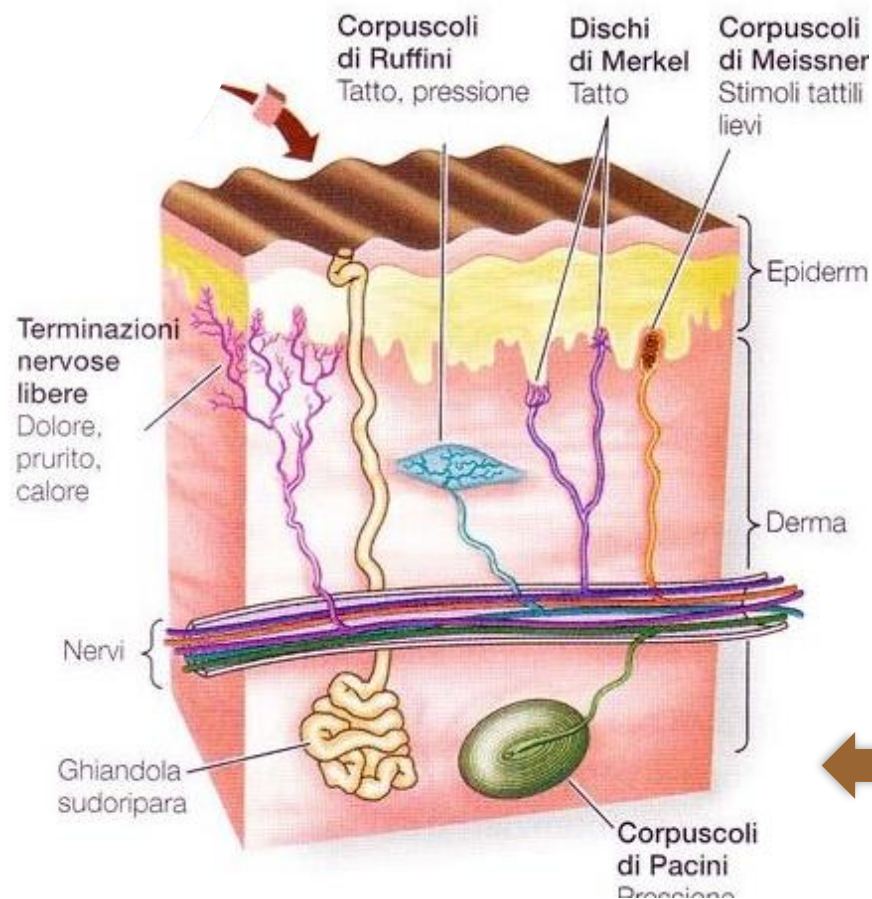

COME AGISCONO LE VIBRAZIONI NEL CORPO UMANO PERCORSO DELLE VIBRAZIONI

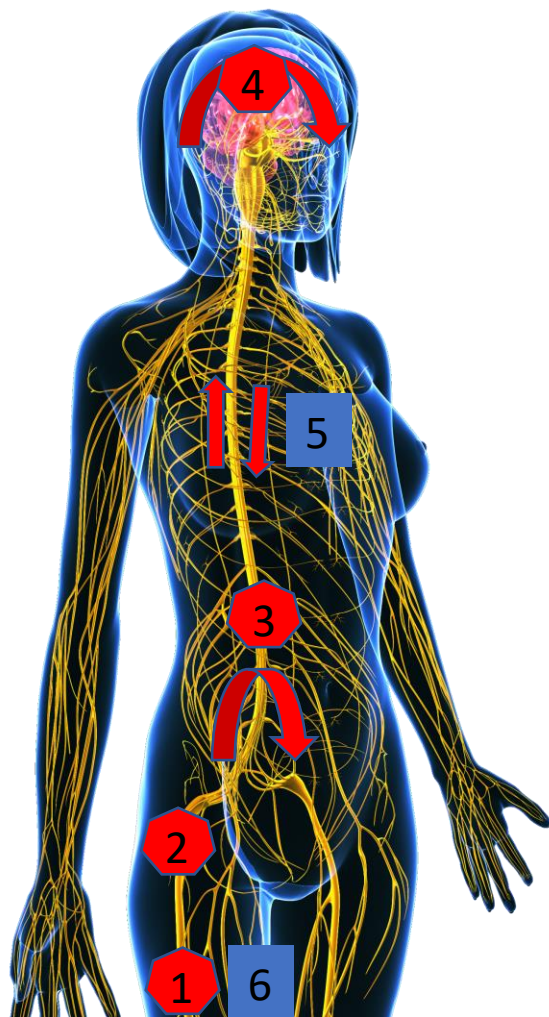


1. Le cellule nervose meccanorecettori **raccolgono l'informazione** dello stimolo vibratorio (potenziali d'azione, messaggi).
2. la **trasmettono ai centri di elaborazione** tramite le vie afferenti.
3. Arrivate nel midollo spinale, **le diverse frequenze si riuniscono a gruppi**, senza sovrapposizioni.
4. Lo stimolo ora arriva ai centri neuromotori del cervello (SNC) che **resetta le memorie negative ed elabora le informazioni** producendo risposte adatte alle frequenze inviate.
5. Il nuovo segnale **riprogrammato viene inviato verso la periferia** tramite le vie efferenti.
6. L'informazione riprogrammata viene riconsegnata alle unità motorie del muscolo con **il comando di allungamento o contrazione, a seconda delle frequenza utilizzate.**


COME AGISCONO LE VIBRAZIONI NEL CORPO UMANO

RfMI (Risonanza Magnetica Funzionale)

Area del cervello
che si
attiva
Con il
MOVIMENTO

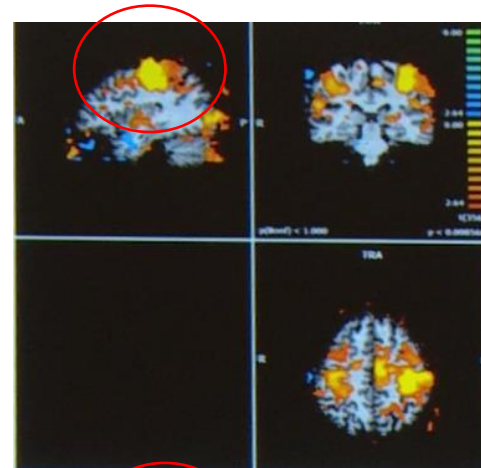


Area del cervello
che si
attiva
con la
VIBRAZIONE

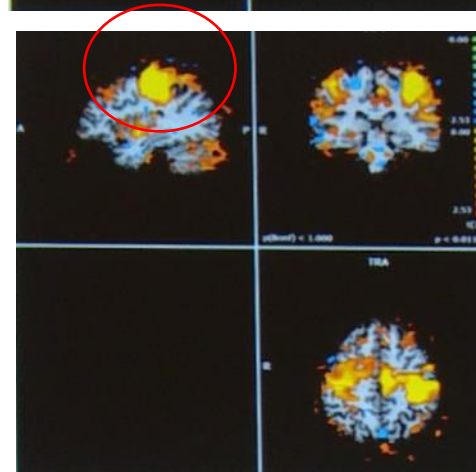

Il cervello
percepisce
la VIBRAZIONE
come lo STIMOLO
MECCANICO della
CONTRAZIONE
MUSCOLARE

**SONO
FISIOLOGICAMENTE
DISPONIBILI
numerosi benefici per la
salute e relativi effetti di
natura estetica.**

in questa RMN, stimoli generati da una vibrazione alla mano, alla corteccia ...

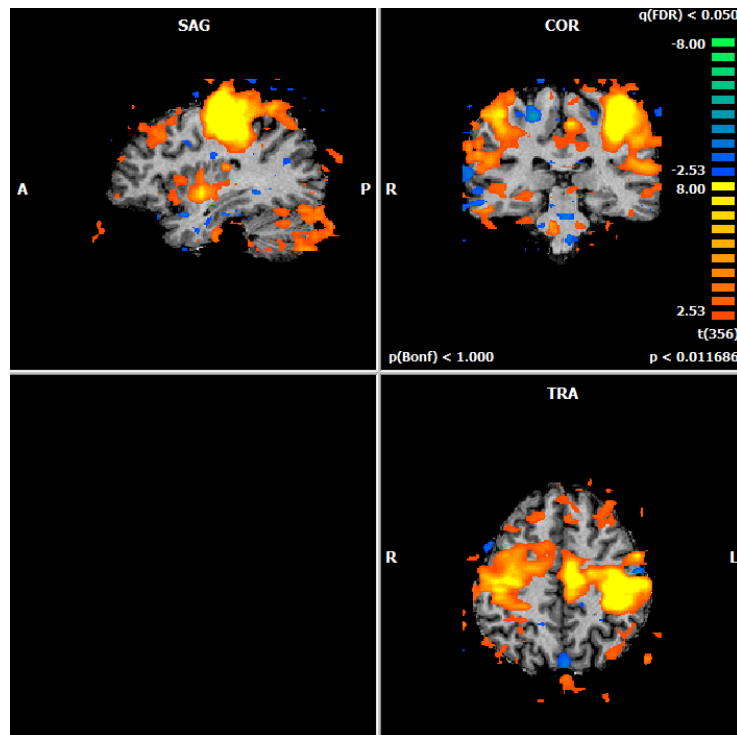


- **elicitano** l'attività corticale attivando l'area motoria primaria (**M1**) e l'area sensoriale primaria (**S1**).
- nell'area sensoriale (**S1**) l'attivazione controlaterale è maggiore che quella ipsilaterale.
- tutte le frequenze attivano bilateralmente il piano profondo comune dell'area sensoriale secondaria (**S2**).

MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI DELLA VIBRAZIONE



Experimental Neurology
Volume 22, Issue 4, December 1968, Pages 674-694

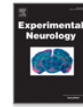

Discharge characteristics of human muscle
afferents during muscle stretch and contraction

K.-E. Hagbarth ^{a, b}, Å.B. Vallbo ^{a, b, 1}

^a Department of Clinical Neurophysiology, Academic Hospital, Uppsala, Sweden

^b Department of Physiology, University of Umeå, Umeå, Sweden

Received 6 June 1968, Available online 9 February 2004.

Una vibrazione applicata sul tendine di un muscolo esercita una potente **azione eccitatoria sul fuso neuromuscolare**, in grado di evocare una scarica afferente lungo le fibre Ia, a imitazione di quanto avviene durante una contrazione isometrica volontaria

MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI DELLA VIBRAZIONE

Journal List > J Physiol > v.261(3); 1976 Oct > PMC1309167



[J Physiol](#). 1976 Oct; 261(3): 695–711.

doi: [10.1113/jphysiol.1976.sp011581](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1976.sp011581)

PMCID: PMC1309167

PMID: [135841](#)

The responses of human muscle spindle endings to vibration during isometric contraction.

[D Burke](#), [K E Hagbarth](#), [L Löfstedt](#), and [B G Wallin](#)

La vibrazione è in grado di produrre fenomeni di attivazione, così come una **l'effetto tonico vibratorio**, in grado di “imitare” il **riflesso tonico di stiramento** di una contrazione isometrica volontaria

MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI DELLA VIBRAZIONE

Case Reports > [G Ital Med Lav Ergon.](#) 2019 Jul;41(3):255-259.

100 Hz Localized vibration increases ipsilateral cerebellar areas activity during a motor task in healthy subjects: Three Cases Report

Roberto Casale¹, Cira Fundar², Zaira Symeonidou^{1 3}, Anna Furnari⁴, Nicola Taiocchi⁴, Caterina Galandra⁵

Affiliations

Affiliations

- ¹ Pain Rehabilitation Units, Habilita Care and Research Hospitals, Zingonia (BG), Italy.
- ² Neurophysiopatology Unit, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS Montescano (PV) Italy.
- ³ European Federation of Pain - EFIC Fellowship.
- ⁴ Neurorehabilitation Unit, Habilita Care and Research Hospitals, Zingonia (BG), Italy.
- ⁵ Neuroradiology Unit, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS Pavia (PV), Italy.

PMID: 31242356

La modulazione della frequenza attiva aree corticali diverse (azioni differenziate) che modificano gli output motori dei muscoli stimolati: **la vibrazione attiva sostanzialmente le stesse aree somato-motorie del movimento**, ma in induce anche un aumento statisticamente significativo di **attività dei lobi cerebellari**

MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI DELLA VIBRAZIONE

Article

Frequency-dependent patterns of somatosensory cortical responses to vibrotactile stimulation in humans: A fMRI study

February 2013 · [Brain Research](#) 1504

DOI: [10.1016/j.brainres.2013.02.003](#)

Source · [PubMed](#)

Authors:



Yoon Gi Chung



Junsuk Kim
Korea University



Sang Woo Han
Korea Advanced Institute of Science and ...




Hyung-Sik Kim
Konkuk University

La vibrazione elicit l'attività corticale somato-sensoriale. Diverse frequenze (40, 80, 120 e 160 Hz) attivano bilateralmente la corteccia parietale posteriore (5-50 Hz) e la branca superiore del solco laterale (50-400 Hz), che mostra una maggiore correlazione alla frequenza applicata

La RISPOSTA CORTICALE è in relazione alla FREQUENZA (Hz)
dello stimolo vibratorio



THE
BEAUTY
VIBE

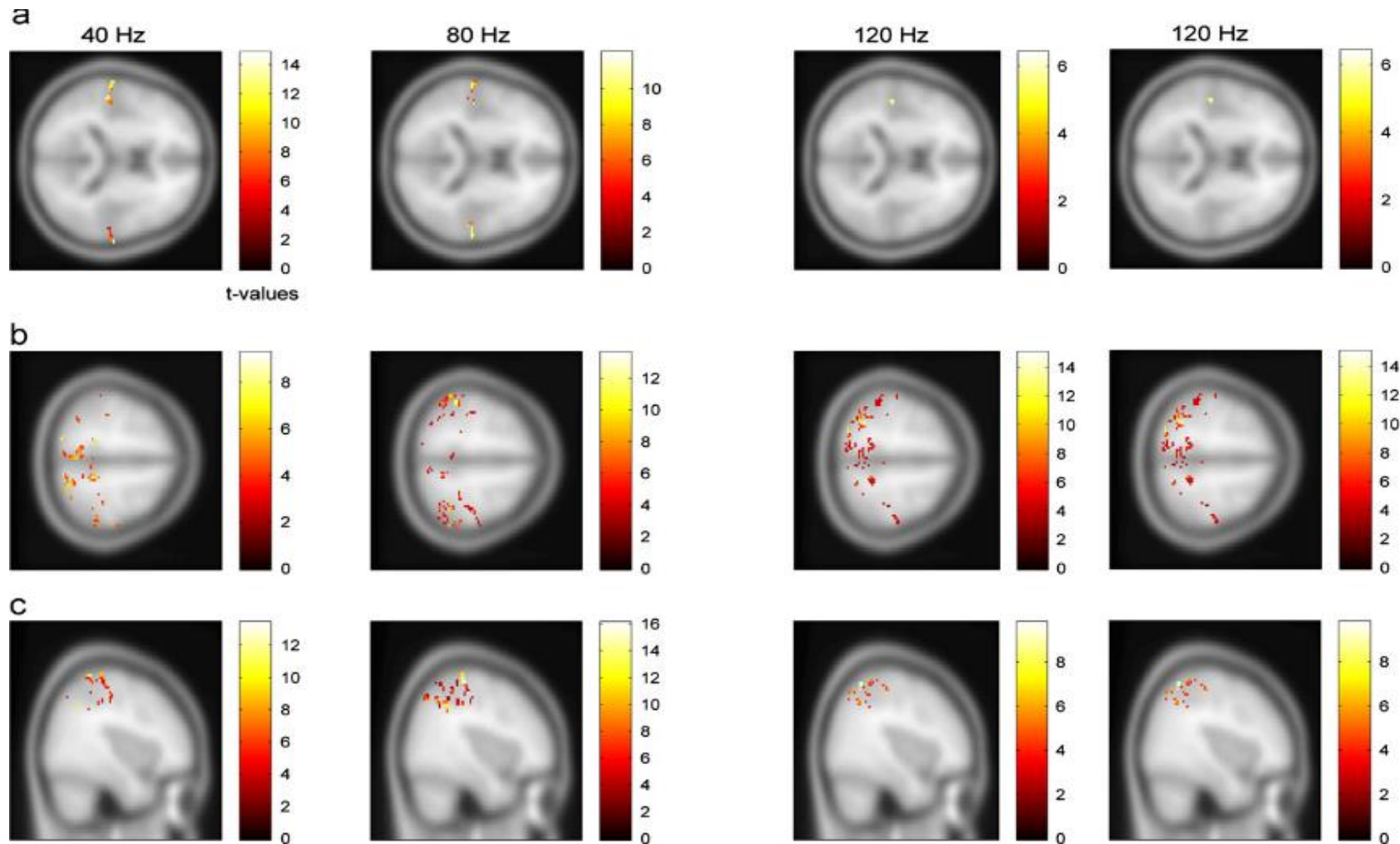

COME AGISCONO LE VIBRAZIONI NEL CORPO UMANO



Il risultato di tale interazione è un

Reset

Riprogrammazione

**Potenziamento di tutta la rete
nervosa che diventa più capace e
funzionale**

- Resettano le memorie negative
- Riattivano le informazioni omeostatiche
- Regolano gli scambi di informazione
- Riequilibrano e allenano
- Fissano le nuove memorie

COME AGISCE IL MOVIMENTO NEL CORPO UMANO?



THE BEAUTY VIBE

APPROCCIO A PIÙ LIVELLI SULLA CAUSA DELL'INESTETISMO



- Equilibrio ormonale
- Sblocco energetico
- Azione connettivale – detensione setti fibrosi
- Azione METABOLICA e riflessogena multiorgano
- Azione posturale
- Azione vascolare
- Azione riattivazione e allenamento muscolare

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
50 Hz	PEFS, GONFIORE	Vascolarizzazione, microangiogenesi	Stazioni linfatiche
80 Hz	BENESSERE	Rilassamento	Organi Tendinei di Golgi Fusi Neuromuscolari
100 Hz	METABOLICO	Riattivazione Metabolica Riequilibrio ormonale stimoli adattativi sul sistema endocrino	Organi Tendinei di Golgi Recettori interstiziali Corpuscoli di Ruffini
45 Hz	ADIPE	Riattivazione metabolica e dimagrimento	Stazioni linfatiche Recettori interstiziali a lento adattamento
150 Hz	ANTIAGE	Tonificazione, ricompattamento Ricondizionamento muscolare	Fusi Neuromuscolari
100 Hz	EPIDERMIDE	Stimolazione dei fibroblasti, riossigenazione	Organi Tendinei di Golgi Attivazione ormonale Stimolazione fibroblasti

THE BEAUTY VIBE PER IL VISO:



- Anti-Age
- Doppio mento
- Stimolazione dei fibroblasti
- Booster di acido ialuronico
- Volume labbra
- Rimodellamento pre-post operatorio

THE BEAUTY VIBE PER IL CORPO:



- Riduzione adipe e cellulite
- Rigenerazione connettivale
- Tonificazione muscolare e rimodellamento
- Booster metabolico
- Drenaggio vascolare
- Allungamento muscolare
- Miglioramento posturale

THE BEAUTY VIBE PER LA PERSONA:



Abbatte lo stress psicofisico;
Migliora la qualità del sonno;
Aumenta la motivazione
Migliora L'UMORE

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
45 Hz	ADIPE	Riattivazione metabolica e dimagrimento	Stazioni linfatiche Recettori interstiziali a lento adattamento

INDICAZIONI

- Dimagrimento
- Adiposità distrettuale e diffusa
- Doppio mento

45Hz – ADIPE



EFFETTI

L'applicazione dello stimolo vibratorio riduce gli accumuli adiposi ed i livelli di leptina sierica (Huang 2014).

Questa breve vasocostrizione e la conseguente modificazione di flusso e di ossigeno, rappresentano un potente vasodilatatore (Sarelius 2010)

L'allenamento con vibrazioni è considerato una nuova strategia di perdita di peso; il peso corporeo e l'indice del metabolismo dei grassi, la glicemia, i trigliceridi, il colesterolo e gli acidi grassi liberi sono diminuiti significativamente.

Inoltre, gli adipociti nel tessuto adiposo bianco retroperitoneale (WAT) diventano più piccoli a causa dell'esercizio vibratorio e hanno un aumento del livello proteico della molecola chiave del tessuto adiposo bruno (BAT), che svolge un ruolo importante nella regolazione del peso corporeo essendo in grado di controllare il livello di adiposità, per ridurre le concentrazioni di trigliceridi e combattere l'obesità.

50 Hz Azione DRENANTE

- Rapida reazione di vaso-costrizione seguita da una vaso-dilatazione riflessa
 - ✓ Incremento del ritorno venoso e linfatico
- Applicazione sulle stazioni linfo-nodali

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
50 Hz	PEFS, GONFIORE	Vascolarizzazione, microangiogenesi	Stazioni linfatiche

INDICAZIONI

- drenaggio post- chirurgico, post –traumatico
- linfodrenaggio
- pannicolopatia edemato-fibrosclerotica

50HZ – DRENANTE VASCOLARE E LINFATICO



EFFETTI

L'applicazione di uno stimolo esteroceettivo (vibrazione), provoca una reazione autonoma in vasocostrizione, seguita poi da una vasodilatazione riflessa (Casale 1985).

Nella nostra esperienza le vibrazioni meccano-sonore contribuiscono positivamente alla riduzione di linfedemi (Vavassori, 2015- Zanetti, 2015)

Facendo vibrare, in modalità TDV, un arto inferiore è stato dimostrato un aumento del flusso ematico nell'arto sottoposto a vibrazione, confermando l'azione riflessa vasodilatatoria localizzata (Kershan-Schindl 2001)

80 Hz Azione DECONTRATTURANTE

- Aumentare distensibilità della fibra muscolare
- Contrastare ed eliminare contratture muscolari e l'ipertrofia
- Rilascia fibre in retrazione antalgica in fibrosi
- Recupero equilibrio muscolare agonisti/antagonisti
- Stretching
- Terapia manuale
- PNF

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
80 Hz	BENESSERE	Allungamento	Organi Tendinei di Golgi Fusi Neuromuscolari

INDICAZIONI

- Ipertensioni muscolari
- Trigger point

100 Hz Azione su TONO e CONTRAZIONE

- Ri-attivare unità motorie
- Stimolare la propriocettività
- Creare reset schemi motori
- Progressione di contrazione
- Progressione di carico
- Azione sovra-segmentale
 - ✓ Riduzione ipertono antagonista

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
100 Hz	METABOLICO	Riattivazione Metabolica Riequilibrio ormonale stimoli adattativi sul sistema endocrino	Organi Tendinei di Golgi Recettori interstiziali Corpuscoli di Ruffini
100 Hz	EPIDERMIDE	Stimolazione dei fibroblasti, riossigenazione	Organi Tendinei di Golgi Attivazione ormonale Stimolazione fibroblasti

- **INDICAZIONI**

- ✓ PRE- POST CHIRURGICO
- ✓ PRE-POST LIPOSUZIONE
- ✓ PRE-POST INIETTIVO

- **APPLICAZIONE**

Trasduttore sulla giunzione miotendinea del muscolo interessato

100HZ – PREPARATORE, RIATTIVATORE METABOLICO, RIATTIVATORE FIBROBLASTI



- **EFFETTI**

- Effettua un reset degli schemi motori, stimolo propriocettivo, attivazione UM e RTV (Casale, 2018)
- Riattiva il metabolismo tramite la stimolazione di endorfine e la riduzione dei livelli di ormoni killer (Casale, 2022)
- Stimola la produzione di fibroblasti e collagene (McHenry et al. 2014).

150 Hz Incremento CAPACITÀ CONDIZIONALI

- Reclutamento massimale di unità motorie
- Incremento forza muscolare (legata al numero di fibre presenti nel muscolo e dal loro diametro trasverso e necessita di 4-6 settimane)
- Sviluppo resistenza e coordinazione
- I miglioramenti della resistenza muscolare sono legati all'ottimizzazione del sistema sensori-motorio

Le applicazioni principali per obiettivo estetico

Frequenza	FOCUS	EFFETTO	Recettori
150 Hz	ANTIAGE	Tonificazione, ricompattamento Ricondizionamento muscolare	Fusi Neuromuscolari

- INDICAZIONI
- Tonificazione antiage
- Post-chirurgico
- Post-iniettivo

in sinergia con altre tecniche non chirurgiche

- APPLICAZIONE

Trasduttore sul ventre del muscolo interessato

300 Hz Incremento PRESTAZIONI ATLETICHE

- NON RIEDUCATIVA
- Specifica per preparazione atletica
- Training Simulation
(stimolo come se il muscolo fosse attivato)


- Long Term Potentiation
(microcicli di 3 giorni genera effetti fino a 4-8 settimane)

Feldman - Potenziamento di selezionate reti nervose dovuto alla capacità plastica del SN per effetti di uno stimolo esteroceettivo; 2005

150HZ – TONIFICAZIONE/ANTIAGING

- **EFFETTI**

La vibrazione infatti è in grado di indurre sia cambiamenti di performance muscolare (Fattori 2003) sia miglioramento dei parametri di fatica mioelettrica attraverso una modifica centrale dell'ordine di reclutamento. Tali modifiche sono state interpretate come una risposta adattativa al condizionamento indotto dalla vibrazione ad alta frequenza (Casale 2009).

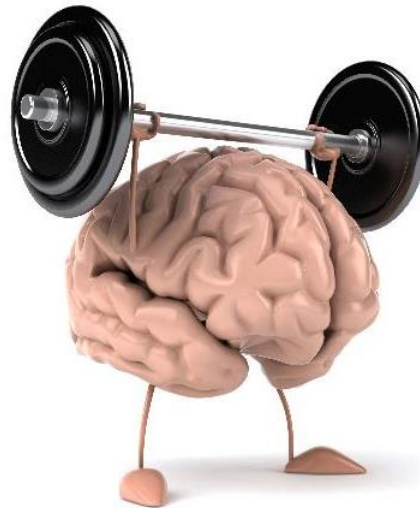

L'INESTETISMO PER ECCELLENZA: CELLULITE



Perché ieri il mio metodo funzionava?
Cosa è cambiato?
Cosa manca oggi?

L'approccio sulla causa:

Miglioro e risolvo a partire dall'origine

Dalla definizione classica: La cellulite è uno stato infiammatorio ...

Alla realtà: la cellulite è frutto di numerose alternazioni morfologiche

- Presenta un'alterazione circolatoria
- Presenta un'alterazione del tessuto adiposo
- Presenta un edema

**PANNICOLOPATIA EDEMATO FIBRO SCLEROTICA
O
LIPODISTROFIA GINOIDE**

**POSSIAMO AGIRE IN QUESTO CONTESTO NEL NOSTRO SALONE?
E SE SÌ...COME?**



Lo strumento Vibra come approccio multidisciplinare

Equilibrio ormonale

Azione vascolare

Azione connettivale – setti fibrosi

Azione adipe localizzato

Tonificazione

CONTROINDICAZIONI



- Arteropatie obliteranti
- Gravi disordini coagulazione
- Tromboflebiti o varicoflebiti
- Neoplasie
- Infezioni ossee o tendinee
- Ipersensibilità capillare
- Zone interdette
- Vicinanza seno carotideo
- Lesioni della fibra muscolare

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI



DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI

NOME PROGRAMMA	PROGRAMMA BASE 1	PROGRAMMA BASE 2	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6	FASE 7	FASE 8	FASE 9	FASE 10	FASE 11	FASE 12
			F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T
Corpo-Tonificazione 1 TONO 1	Metabolico Base 1	Tonificazione 1	100	4	45	3	100	3	150	4	45	3	100	3
Corpo-Tonificazione 2 TONO 2	Metabolico Base 2	Tonificazione Base 2	45	4	150	3	100	3	45	4	150	3	100	3
Corpo-Cellulite 1 CELL 1	Metabolico Base 1	Cellulite Base 1	100	4	45	3	100	3	150	4	45	3	100	3
Corpo-Cellulite 2 CELL 2	Metabolico Base 2	Cellulite Base 2	45	4	150	3	100	3	45	4	150	3	100	3
Corpo-Adipe 1 ADI 1	Metabolico Base 1	Adipe Base 1	100	4	45	3	100	3	150	4	45	3	100	3
Corpo-Adipe 2 ADI 2	Metabolico Base 2	Adipe Base 2	45	4	150	3	100	3	45	4	150	3	100	3
Corpo-Bioenergetico BIO	Metabolico Base 1	Metabolico Base 2	100	4	45	3	100	3	150	4	45	3	100	3
Corpo-Seno SENO	Benessere Base 2	fase singola	100	4	80	3	35	3	80	4	50	3	100	3

I programmi composti costituiscono la seduta, e sono sempre formati da due programmi base, in particolare 1 programma metabolico base + 1 programma target base

- I trattamenti hanno una durata complessiva di 40 minuti, suddivisa in 2 protocolli da 20 minuti, il primo metabolico ed il secondo specifico per l'obiettivo da raggiungere

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI



Protocolli Applicativi – ESEMPI ed indicazioni pratiche

- Valutazione attraverso adipometria/misure antropometriche/impedenziometria
- Proposta da 12 sedute, suddivise in:
 - 4 sedute due volte a settimana per due settimane
 - 8 sedute una volta a settimana per quattro settimane
 - Mantenimento ideale: 1 volta al mese (ipotesi di abbonamento annuale)
- Dopo 4 sedute complete, è possibile focalizzarsi su un punto più preciso insieme al resto
- Associare contrazioni isometriche ed isotoniche durante seduta
- Dopo 5-6 sedute, avviene una stasi metabolica da assuefazione che deve essere prevenuta con la variazione di qualche parametro nei protocolli
- Fare sempre foto prima e dopo di ogni trattamento perché il risultato è progressivo e duraturo quindi i clienti si dimenticano come erano all'inizio
- Consiglio: Mostrare le foto dei risultati dei trattamenti ogni 4 sedute circa per aumentare le conversioni di vendita

PROTOCOLLO/SEDUTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tonificazione muscolare e tessutale	BIO	CELL 1	CELL 2	TONO 1	TONO 2	BIO	CELL 1	TONO 2	TONO 1	CELL 2	TONO 2	TONO 1
	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
Cellulite molla con adipe Cellulite con tensioni muscolari	BIO	CELL 1	ADI 1	CELL 2	ADI 2	BIO	ADI 2	CELL 2	TONO 2	TONO 1	TONO 2	CELL 1
	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
Cellulite edematosa	BIO	CELL 1	ADI 1	CELL 2	ADI 2	BIO	CELL 1	CELL 2	TONO 2	TONO 1	TONO 2	TONO 1
	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8
Supporto al dimagrimento	BIO	CELL 1	TONO 1	ADI 1	TONO 2	BIO	ADI 2	CELL 1	TONO 1	ADI 1	TONO 2	CELL 1
	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8	6	8

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI

VARIANTI:

Soggetto anziano...magro....stanco...





Before and After

Donna 50 anni menopausa 5 sedute

→
Riduzione volume
E circonferenze

Riduzione adipe
E cellulite



→
Sblocco vascolare
postura



Donna 50 anni menopausa 5 sedute

→
Riduzione volume
E circonferenze

Riduzione adipe
E cellulite



→
Riequilibrio
posturale

Dimagrimento
con
tonificazione



Donna 50 anni in pre-menopausa 9 sedute

Rimodellamento glutei e schiena

Rimodellamento, definizione punto vita





THE
BEAUTY
VIBE

Giovane operaia 27 anni 10 sedute

Rimodellamento glutei

Rimodellamento cosce

Riduzione cellulite



Giovane 30 anni a seguito di dimagrimento 40 Kg

Rimodellamento

Riduzione volumi e adipe

Tonificazione muscolare e tessuti



Giovane donna 40 anni 6 sedute

Rimodellamento glutei

Rimodellamento cosce

Rimodellamento
fianchi e definizione
punto vita



6 sedute

Atonia muscolare e tessutale



10 sedute



**Completa risoluzione
delle manifestazioni
acneiche tramite sedute
corpo Vibra detossinanti,
bioenergetiche e
riequilibranti**

RIMODELLAMENTO 14 SEDUTE



ABBONAMENTO ANNUALE, 15 sedute



RIMODELLAMENTO ADDOME 10 SEDUTE post 3 cesarei



Prima



Dopo 2 sedute



Dopo 4 sedute



Dopo 4 sedute



Dopo 6 sedute



Dopo 8 sedute





Dopo 9 sedute

VIBRATHERMIA

VT Technology

VISO

ANDIAMO OLTRE L'ANATOMIA DEI MUSCOLI DEL VISO...GUARDIAMO LA LORO FUNZIONE

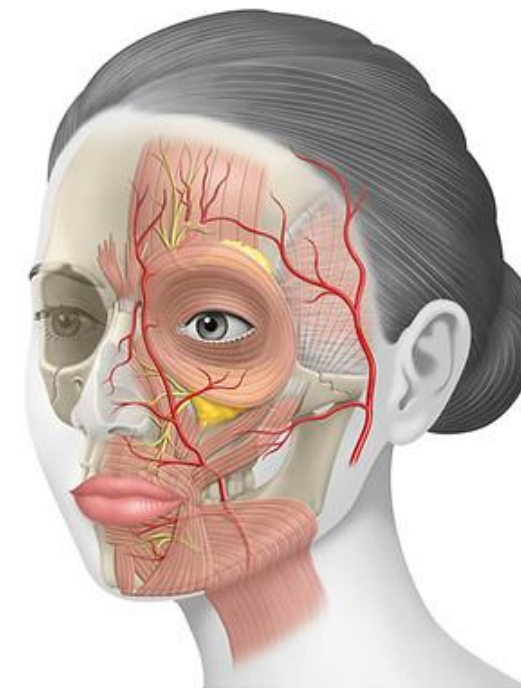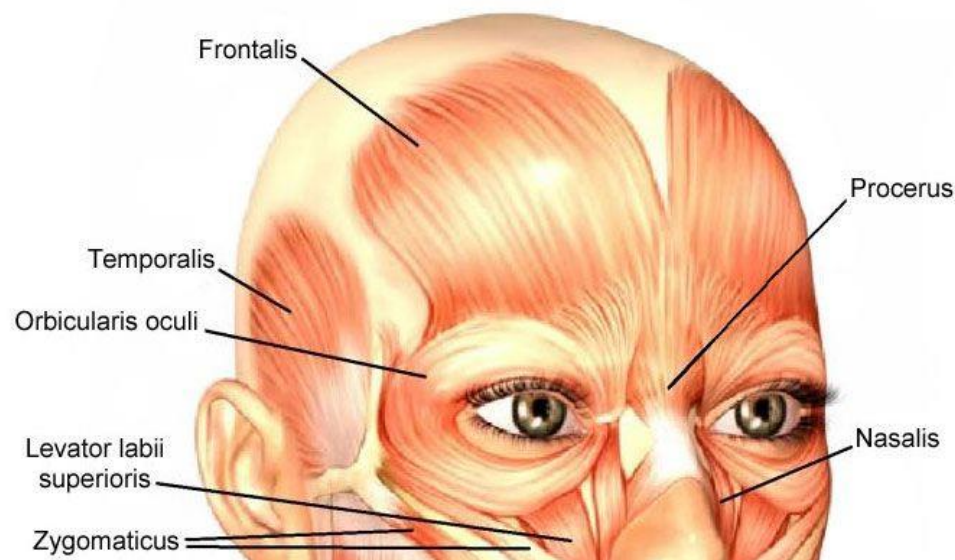



DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI MANUALI O MISTI



▲ **PROTOCOLLI VISO ANTIAGE**

Il protocollo viso prevede inizialmente 6 sedute. Si consiglia di aggiungere i trasduttori fissi pettorali/dorsali.


NOME PROGRAMMA	FASE 1		FASE 2		FASE 3		FASE 4		FASE 5		FASE 6		FASE 7		FASE 8		FASE 9	
	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T
ANTIAGE: ANT 1	80	4	100	3	80	3	150	4	100	3	150	3	50	4	100	4	150	3

NOME PROGRAMMA	FASE 1		FASE 2		FASE 3		FASE 4		FASE 5		FASE 6		FASE 7		FASE 8		FASE 9	
	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T	F[Hz]	T
DOPPIO <u>MENTO:MENT</u>	80	4	100	3	80	3	45	4	150	3	50	3	45	4	80	4	150	3

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI

PROTOCOLLO/SEDUTA	1	2	3	4	5	6
ANTIAGE	BIO	MENT	ANT 1	MENT	MENT	ANT 1
	2	2	3	2	3	2

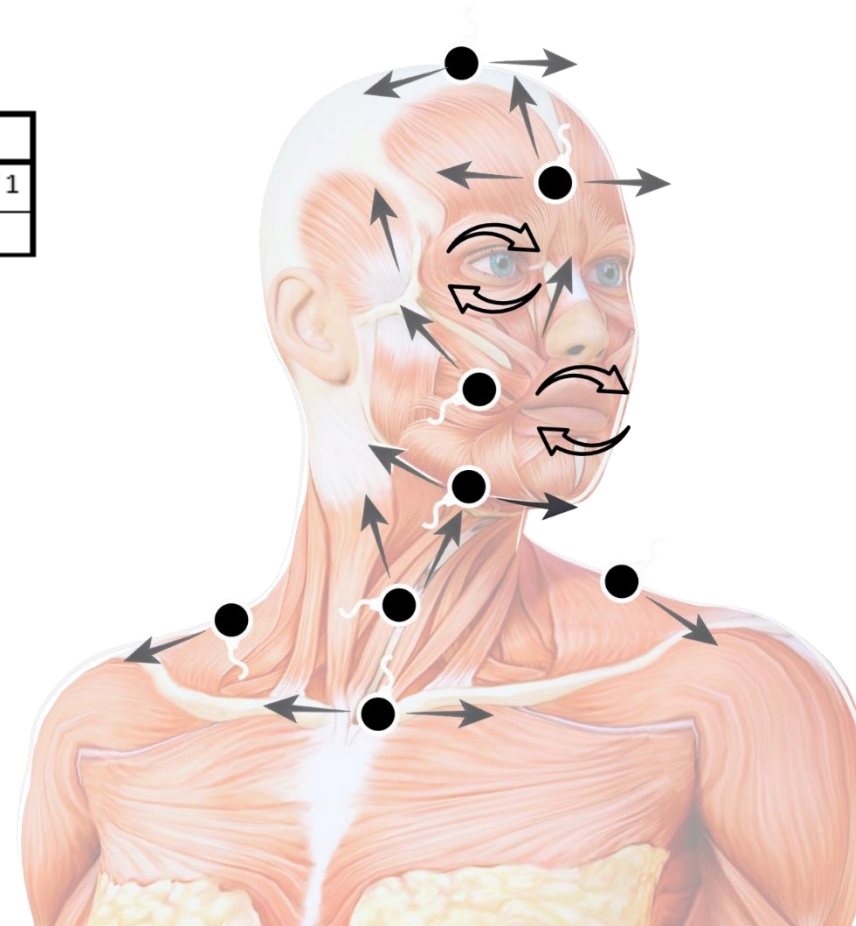

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

TRATTAMENTI AUTOMATICI, MANUALI O MISTI



VARIANTI:

Soggetto anziano...magro....stanco...



Antiage 1 seduta







DEFINIZIONE BARCODE 3 SEDUTE



DEFINIZIONE BARCODE 1 SEDUTA



THE
BEAUTY
VIBE



ANTIAGE 3 E 6 SEDUTE



A SUPPORTO DEL METODO VIBRA

- Sito WEB, SOCIAL e sponsorizzate B2C
- Flyer e brochure
- Roll UP
- Application book e scheda cliente
- Community e contenuti social
- Formazione e open day presso il cliente
- Corsi di aggiornamento online ed in presenza
- Piano marketing consolidato
- Video Emozionale

PUNTI DI FORZA TECNICI/OPERATIVI



PUNTI DI FORZA BUSINESS



DOVE TROVARCI



Sito web vibra

vibra-beauty.com

Sito web aziendale

dowelltechnologies.ch

Sito web medicale

Vibra-system.com



[Vibra.beauty](https://www.instagram.com/vibra.beauty)



VibraBeauty.Swiss