



APPLICATION BOOK



***Vibrazioni bio swiss made:
la fisiologia incontra la tecnologia per un risultato estetico mai visto.***

Le vibrazioni si uniscono alla energia termica esogena (esterna).

Due manipoli viso e corpo sono stati progettati per trattare i vari inestetismi sfruttando la sinergia dell'energia termica.

Inoltre possono essere utilizzati fino a 8 trasduttori non operatore dipendente.



PROGRAMMI VISO

- 6 ANTIAGE
- 8 ANTIAGE PLUS
- 10  ANTIAGE PLUS
- 12 DRENANTE
- 14 EPIDERMIDE
- 16  EPIDERMIDE
- 18 DOPPIO MENTO
- 20 DISTENSIVO

PROGRAMMI CORPO

- 22 BIOENERGETICO PARZIALE
- 24 BIOENERGETICO TOTALE
- 28  DRENANTE LINFATICO
- 30  DRENANTE SEQUENZIALE
ANTISTRESS
- 32 TONIFICAZIONE
- 34  TONIFICAZIONE STATICO
- 36 ADIPE
- 38  ADIPE
- 40 CELLULITE
- 42  CELLULITE
- 44 SENO
- 46 BENESSERE



ANTIAGE



(1)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	35					
TEMPERATURA	34°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui seguendo i muscoli mimici del viso	30	35				

INDICAZIONI: rilassamento, svuotamento, rughe.

OBIETTIVI: la vibrazione tonifica e ridefinisce la muscolatura (30 Hz).
La thermia migliora l'ossigenazione dei tessuti e la vascolarizzazione.


METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.
Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.
Applicare sulle zone da trattare olio *11 BIO OIL*.

Con il manipolo viso eseguire i movimenti seguendo i muscoli mimici del viso in avanti e indietro, secondo lo schema applicativo.
Mantenere il livello di potenza tra 1 e 2.

Al termine del trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio.

FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 6 trattamenti (1 a settimana) e 4 sedute di mantenimento a frequenza mensile.

PRODOTTI:

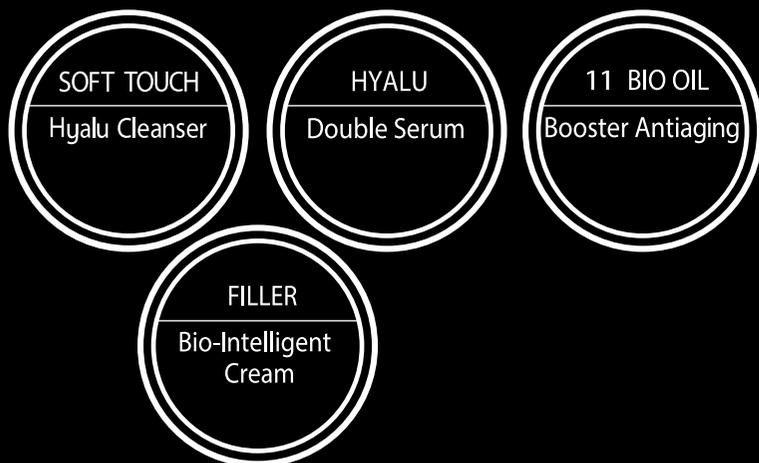




ANTIAGE PLUS



(1)

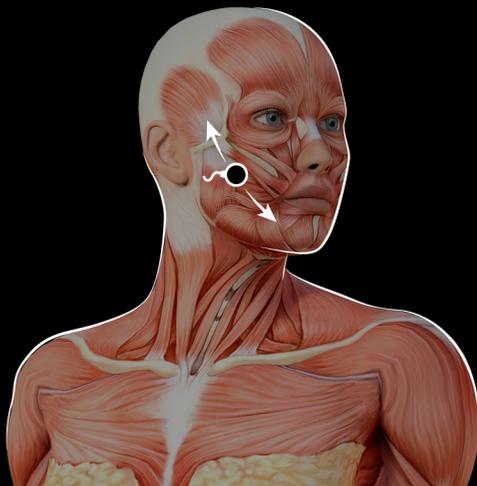

(2)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	40					
TEMPERATURA	34°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Trattamento (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui dal basso verso l'alto	100	10				
Trattamento (2)						
Movimenti continui seguendo i muscoli mimici del viso			30	30		

INDICAZIONI: rilassamento, svuotamento, rughe, disidratazione.

OBIETTIVI: la vibrazione stimola i fibroblasti, favorisce la penetrazione attiva (100 Hz), tonifica e ridefinisce la muscolatura (30 Hz).
La thermia migliora l'ossigenazione dei tessuti e la vascolarizzazione.

METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.

Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.

Applicare la *TABLET MASK*.

FASE 1: con il manipolo viso e sopra la *TABLET MASK*, eseguire movimenti continui dal basso verso l'alto in senso verticale su tutto il viso e il collo mantenendo il livello di potenza tra 1 e 2 per 10 minuti totali.

Rimuovere la maschera.


Applicare *11 BIO OIL* su tutto il viso e collo.

FASE 2: con il manipolo viso eseguire i movimenti seguendo i muscoli mimici del viso in avanti e indietro secondo lo schema applicativo per 30 minuti. Mantenere il livello di potenza tra 1 e 2.

Al termine del trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 6 trattamenti (1 a settimana) e 4 sedute di mantenimento a frequenza mensile.

PRODOTTI:

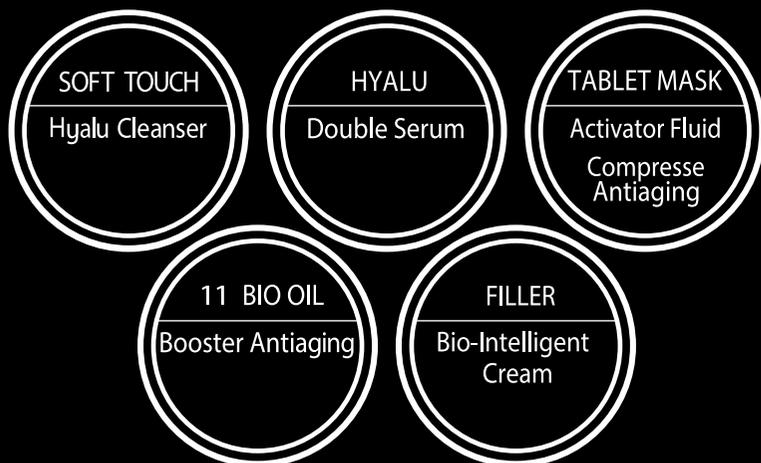



ANTIAGE PLUS

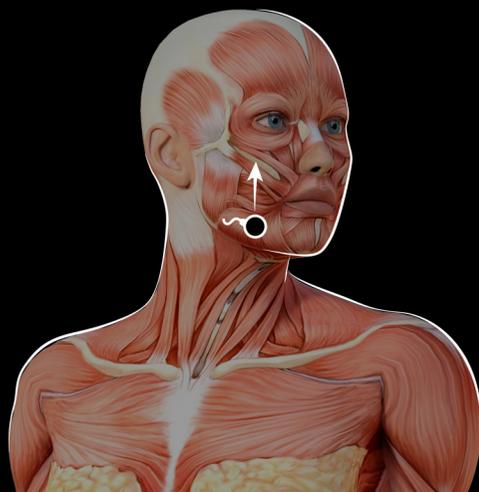

(1)



(2)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE + STATICO					
MINUTI TOTALI	25					
TEMPERATURA	-					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Trattamento (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui dal basso verso l'alto	100	10				
Trattamento (2)						
Statico su braccia e seno. Movimenti continui seguendo i muscoli mimici del viso			30	15		

INDICAZIONI: rilassamento, svuotamento, rughe, disidratazione.

OBIETTIVI: la vibrazione stimola i fibroblasti, favorisce la penetrazione attiva (100 Hz), tonifica e ridefinisce la muscolatura (30 Hz).

METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.

Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.
Applicare la *TABLET MASK*.

FASE1: con i trasduttori ultrapiùcoli e sopra la *TABLET MASK*, eseguire movimenti continui dal basso verso l'alto in senso verticale su tutto il viso e il collo mantenendo il livello di potenza tra 1 e 2 per 10 minuti.

Rimuovere la maschera.

Applicare *11 BIO OIL* su tutto il viso e collo.


FASE 2: posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, sul muscolo laterale del seno, sulla bretella e sul muscolo tricipite del braccio.

Con i trasduttori ultrapiùcoli eseguire i movimenti seguendo i muscoli mimici del viso in avanti e indietro secondo lo schema applicativo per 15 minuti. Mantenere il livello di potenza tra 1 e 2.

Al termine del trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 6 trattamenti (1 a settimana) e 4 sedute di mantenimento a frequenza mensile.

PRODOTTI:

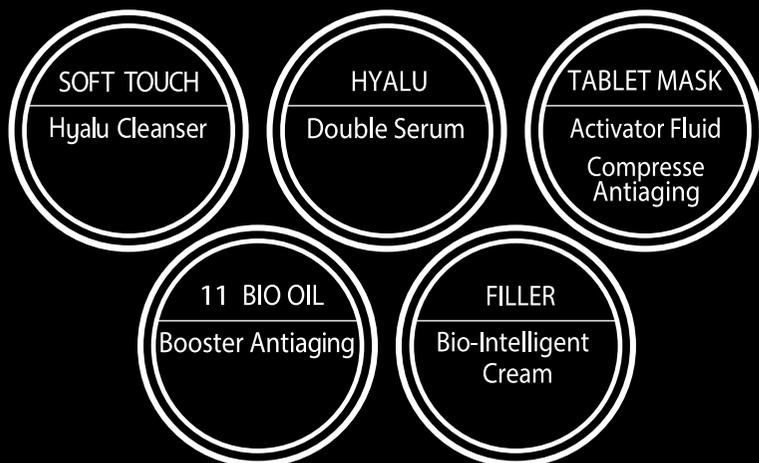



DRENANTE

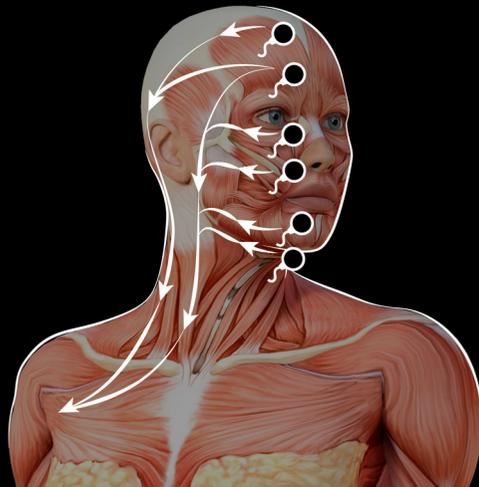

(1)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	20					
TEMPERATURA	34°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti secondo gli scarichi linfatici del viso	50	20				

INDICAZIONI: gonfiore, borse e stasi linfatiche, post pulizia del viso, associato a trattamenti acne e pelli impure, couperose, e pelle reattiva.

OBIETTIVI: la vibrazione vascolarizza, drena il viso e decongestiona la zona perioculare (50 Hz).
La termia facilita una migliore circolazione sanguigna apportando ossigeno ed eliminando le tossine.

METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.
Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.
Applicare la *TABLET MASK*.

Con il manipolo viso eseguire movimenti dal centro del mento, dal naso, dagli occhi e dalla fronte e scaricare sempre sul collo, staccando sempre il manipolo seguendo lo schema applicativo.
Raccogliere le tossine e scaricarle sul lato del viso e del collo portandole fino al ganglio linfatico ascellare per 20 minuti con potenza tra 1 e 2.

Al termine del trattamento rimuovere la maschera e applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio

FREQUENZA TRATTAMENTI: Secondo necessità.

PRODOTTI:

SOFT TOUCH
Hyalu Cleanser

HYALU
Double Serum

TABLET MASK
Activator Fluid
Compresse
Antiaging

11 BIO OIL
Booster Antiaging

FILLER
Bio-Intelligent
Cream



EPIDERMIDE



(1)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	30					
TEMPERATURA	34°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui dal basso verso l'alto	100	30				

INDICAZIONI: disidratazione, pori dilatati, pelle asfittica e spenta.

OBIETTIVI: La vibrazione stimola i fibroblasti e riossigena il tessuto. Favorisce la penetrazione degli agenti attivi.

La termia migliora la circolazione sanguigna e la vascolarizzazione.


METODO D'USO: Detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*. Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento. Applicare la *TABLET MASK*.

Con il manipolo viso sopra la *TABLET MASK* eseguire i movimenti continui dal basso verso l'alto in senso verticale su tutto il viso e collo per 20 minuti con potenza tra 1 e 2 seguendo lo schema applicativo.

Al termine del trattamento rimuovere la maschera e applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio

FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 4/6 trattamenti con cadenza settimanale. Si consiglia di continuare con 1 trattamento mensile come mantenimento. In caso di forte disidratazione la prima settimana effettuare 2 trattamenti.

PRODOTTI:

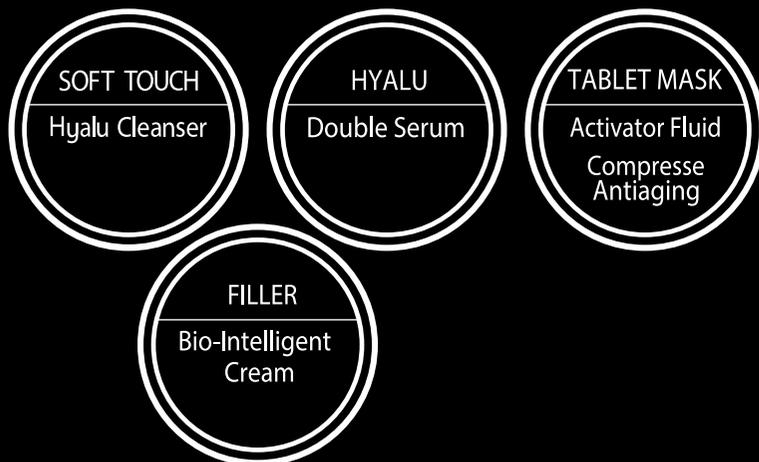



 EPIDERMIDE



(1)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	30					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui dal basso verso l'alto	100	15				

INDICAZIONI: disidratazione, pori dilatati, pelle asfittica e spenta.

OBIETTIVI: La vibrazione stimola i fibroblasti e riossigena il tessuto. Favorisce la penetrazione degli agenti attivi.


METODO D'USO: Detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*. Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento. Applicare la *TABLET MASK*.

Con i trasduttori ultra piccoli sopra la *TABLET MASK* eseguire i movimenti continui dal basso verso l'alto in senso verticale su tutto il viso e collo per 20 minuti con potenza tra 1 e 2 seguendo lo schema applicativo.

Al termine del trattamento rimuovere la maschera e applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio

FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 4/6 trattamenti con cadenza settimanale. Si consiglia di continuare con 1 trattamento mensile come mantenimento. In caso di forte disidratazione la prima settimana effettuare 2 trattamenti.

PRODOTTI:

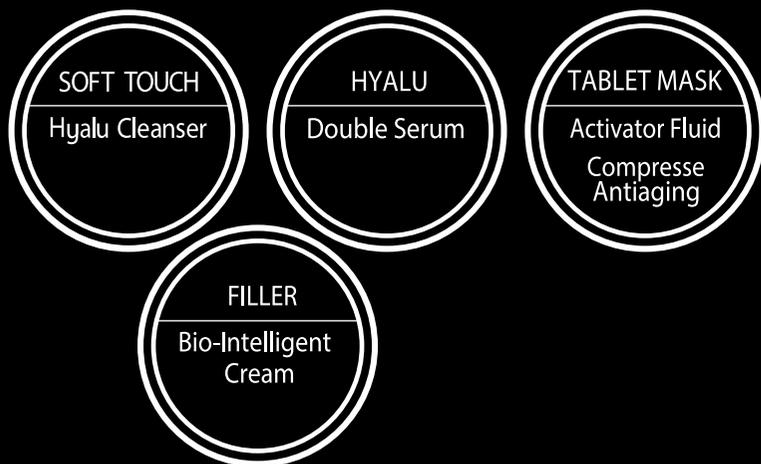



DOPPIO MENTO



(1-2)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	30					
TEMPERATURA	38°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui avanti e indietro	45	20				
<i>Trattamento (2)</i>						
Movimenti continui avanti e indietro			30	10		

INDICAZIONI: adiposità localizzata nella zona del mento e lassità del contorno dell'ovale.

OBIETTIVI: la vibrazione rimodella l'adiposità (45 Hz) e tonifica i muscoli dell'ovale (30 Hz).

La thermia favorisce una migliore circolazione sanguigna e contribuisce al rimodellamento della zona adiposa.

METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.

Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.

Applicare *11 BIO OIL* su tutto il viso e collo.


FASE 1: con il manipolo viso eseguire i movimenti in avanti e indietro continuativo sul contorno dell'ovale insistendo sulla zona di adipe localizzato secondo lo schema applicativo per 20 minuti mantenendo il livello di potenza tra 1 e 2 (45 Hz).

FASE 3: con il manipolo viso eseguire i movimenti in avanti e indietro continuativo sul contorno dell'ovale e del collo secondo lo schema applicativo per 10 minuti mantenendo il livello di potenza tra 1 e 2 (30 Hz).

Al termine del trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio.

FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consigliano 6 trattamenti (1 per settimana) e 4 sedute di mantenimento a frequenza mensile.

PRODOTTI:

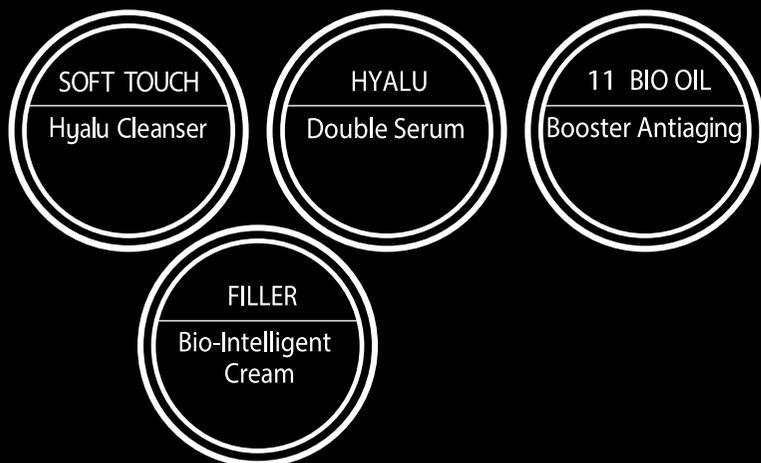



DISTENSIVO



(1)

TRATTAMENTO	VISO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	20					
TEMPERATURA	34°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
<i>Trattamento (1)</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Movimenti continui dal basso verso l'alto	80	20				

INDICAZIONI: contratture e tensioni muscolari del viso in particolare la zona mandibolare, frontale e del collo.

OBIETTIVI: la vibrazione rilassa profondamente i muscoli contratti e distende le rughe di espressione.
La thermia migliora la circolazione sanguigna e contribuisce all'azione decontratturante.


METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.
Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su viso e collo fino a totale assorbimento.
Applicare *11 BIO OIL* su tutto il viso e collo.

Con il manipolo viso eseguire i movimenti dal basso verso l'alto sulle zone contratte. Inserire anche alcuni movimenti di scarico linfatico.
La durata totale è 20 minuti con potenza tra 1 e 2.

Al termine del trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutto il viso e collo con un leggero massaggio.

FREQUENZA TRATTAMENTI: Secondo necessità.

PRODOTTI:

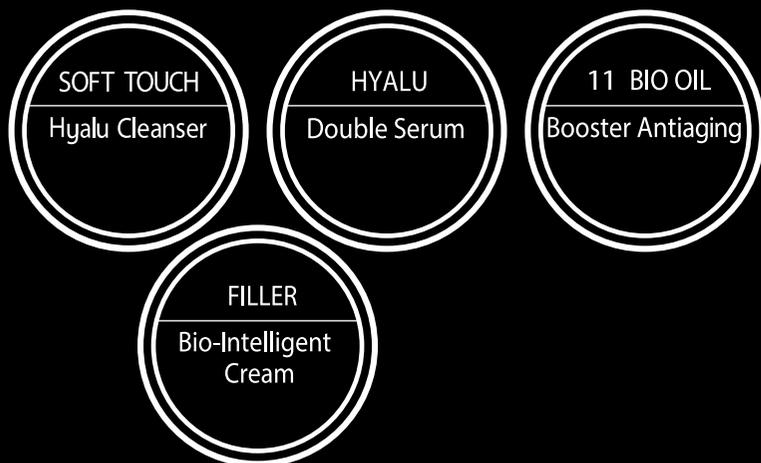




BIOENERGETICO PARZIALE



1-2

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	25					
TEMPERATURA	36°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
<ul style="list-style-type: none">scorrimento dei meridiani principali con punta cilindrica	100	25				

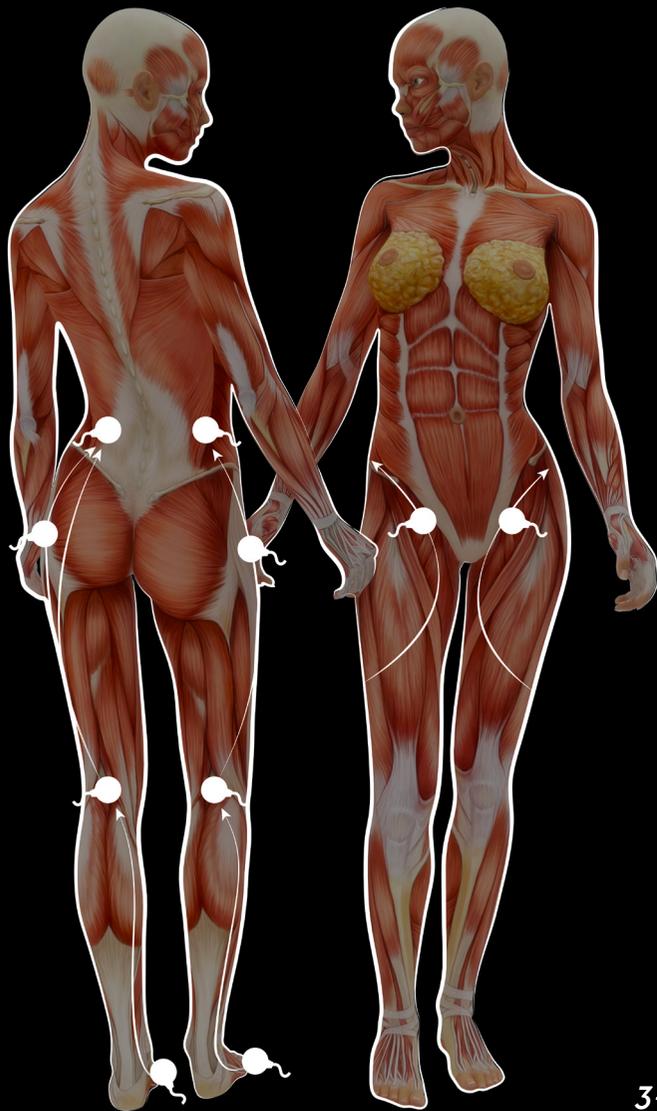

3-8

PRODOTTI:



INDICAZIONI:

prima di ogni protocollo di lavoro come trattamento di preparazione, blocchi energetici, stress, stanchezza.

OBIETTIVI:

la vibrazione sblocca i principali meridiani, elimina le stasi per mantenere fluido lo scorrimento energetico.

La thermia favorisce un miglior apporto sanguigno.

METODO D'USO:

Applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare, con un leggero massaggio. Con il manipolo viso scorrere lentamente i principali meridiani secondo lo schema applicativo.

Ogni meridiano va percorso per circa 3 volte partendo dal centro del piede.

TRATTAMENTO:

1. Effettuare il test sul tallone per capire dove arriva l'energia dei punti riflessi.
2. Passare sui meridiani curiosi della pianta del piede, con un passaggio a croce verticale e orizzontale (almeno 3 passaggi per direzione).
3. Partire dall'alluce e arrivare al ginocchio con scarico verso l'incavo popliteo(3 volte).
4. Partire dal 5° dito (mellino) ed arrivare al ginocchio con scarico verso l'incavo popliteo (3 volte).
5. Partire dall'incavo popliteo, arrivare all'inguine e scaricare verso il rene (3 volte)
6. Partire dall'incavo popliteo, arrivare all'anca e scaricare verso il rene (3 volte)
7. Ripartire dall'alluce, arrivare fino all'inguine e scaricare (3 volte).
8. Ripartire dal mellino ed arrivare fino alle anche verso punto di scarico (3 volte).

FREQUENZA TRATTAMENTI:

si consigliano 1-2 trattamenti settimanali nella fase iniziale




BIOENERGETICO TOTALE



1-2

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	50					
TEMPERATURA	36°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
<ul style="list-style-type: none">scorrimento dei meridiani principali con punta cilindrica	100	50				

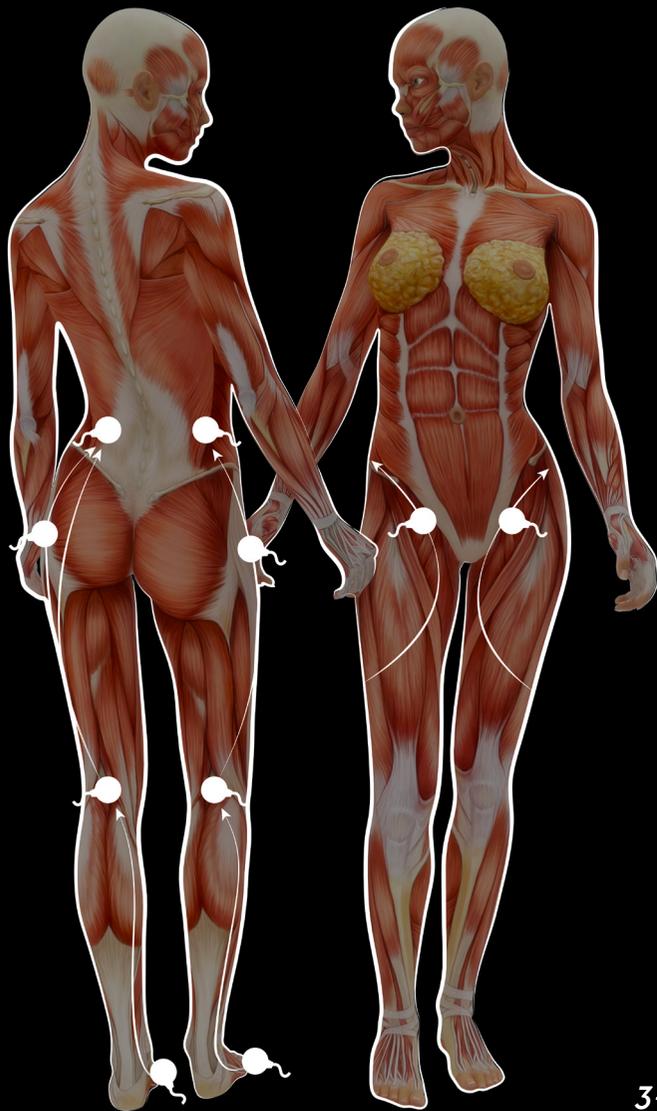

3-8

PRODOTTI:



INDICAZIONI:

prima di ogni protocollo di lavoro come trattamento di preparazione, blocchi energetici, stress, stanchezza, squilibrio generale, metabolismo lento o bloccato.

OBIETTIVI:

la vibrazione sblocca i principali meridiani, elimina le stasi per mantenere fluido lo scorrimento energetico.

La thermia favorisce un miglior apporto sanguigno.

METODO D'USO:

Applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare, con un leggero massaggio. Con il manipolo viso scorrere lentamente i principali meridiani secondo lo schema applicativo.


Ogni meridiano va percorso per circa 3 volte partendo dal centro del piede.

TRATTAMENTO:

GAMBE

1. Effettuare il test sul tallone per capire dove arriva l'energia dei punti riflessi.
2. Passare sui meridiani curiosi della pianta del piede, con un passaggio a croce verticale e orizzontale (almeno 3 passaggi per direzione).
3. Partire dall'alluce e arrivare al ginocchio con scarico verso l'incavo popliteo (3 volte).
4. Partire dal 5° dito (mellino) ed arrivare al ginocchio con scarico verso l'incavo popliteo (3 volte).
5. Partire dall'incavo popliteo, arrivare all'inguine e scaricare verso il rene (3 volte)
6. Partire dall'incavo popliteo, arrivare all'anca e scaricare verso il rene (3 volte)
7. Ripartire dall'alluce, arrivare fino all'inguine e scaricare (3 volte).
8. Ripartire dal mellino ed arrivare fino alle anche verso punto di scarico (3 volte).

(continua...)

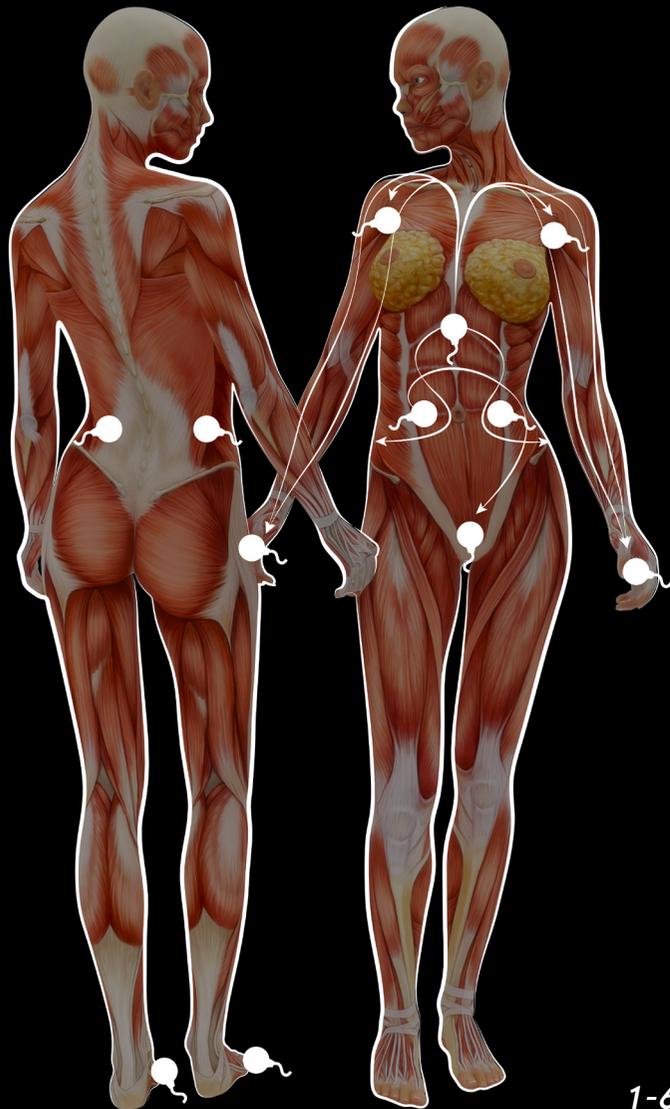

(...continua)


TRATTAMENTO:

ADDOME

1. Partire dal plesso solare, passare la zona intercostale e scaricare sul rene (3 volte).
2. Cercare il punto delle PSOAS con le dita e trattarlo con il manipolo per almeno 30 secondi (normale se doloroso).
3. Partire dallo PSOAS e da sinistra a destra seguire l'anatomia del colon scaricando sulla vescica. Staccare il manipolo e ricominciare dallo psoas (3 volte).
4. Partire dal plesso solare verso lo sterno, salire e proseguire seguendo la clavicola e scaricare nell'incavo ascellare (2 volte)
5. Partire dal plesso solare verso lo sterno, salire e proseguire seguendo la clavicola e poi fino alla mano percorrendo l'interno del braccio (2 volte)
6. Partire dal plesso solare verso lo sterno, salire e proseguire seguendo la clavicola e poi fino alla mano percorrendo l'esterno del braccio (2 volte)

PRODOTTI:



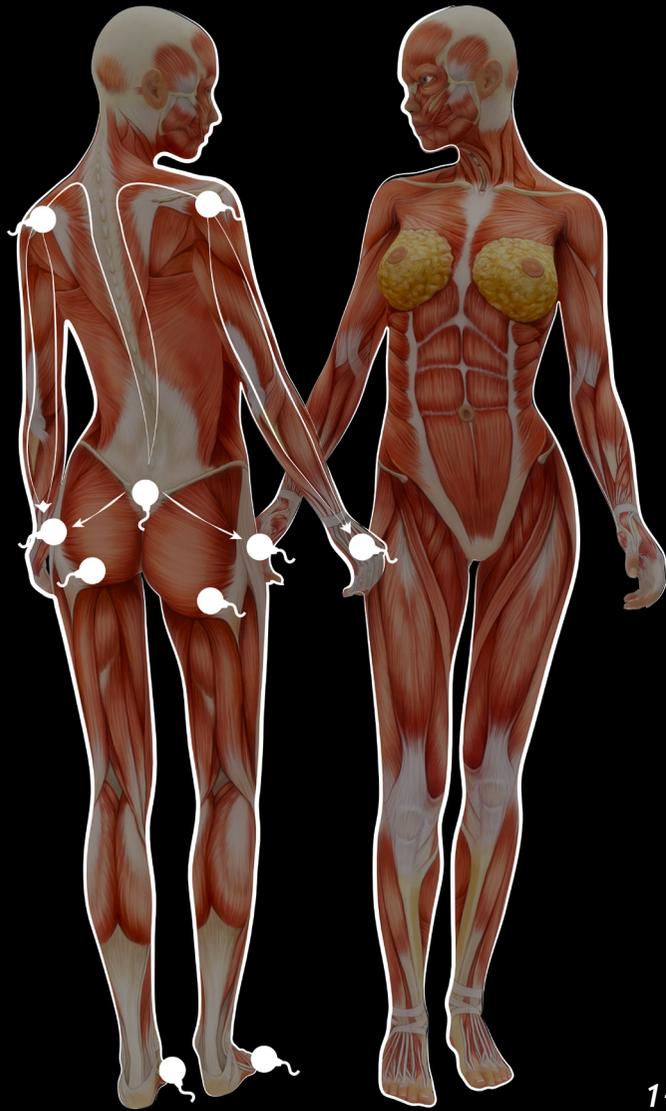

1-2

PRODOTTI:



(...continua)

TRATTAMENTO:

SCHIENA

(far girare la cliente prona)

1. Sbloccare lombo-sacrale: partire dal coccige e scaricare a lato verso l'anca (3 volte)
2. Sbloccare piriforme: (se necessario faccio piegare la gamba del cliente)
Partire dal coccige, passare sui paravertebrali, passare la spalla, il braccio ed arrivare fino alla mano sul lato esterno (3 volte).
Partire dal coccige, passare sui paravertebrali, passare la spalla, il braccio ed arrivare fino alla mano sul lato interno (3 volte).


**FREQUENZA
TRATTAMENTI:**

si consigliano 1-2 trattamenti settimanali a seconda della gravità dello squilibrio.

In caso di blocco del metabolismo effettuare:
3-4 trattamenti consecutivi per poi passare a
1-2 trattamenti alla settimane e poi a
1 a cadenza mensile come mantenimento.



DRENANTE LINFATICO

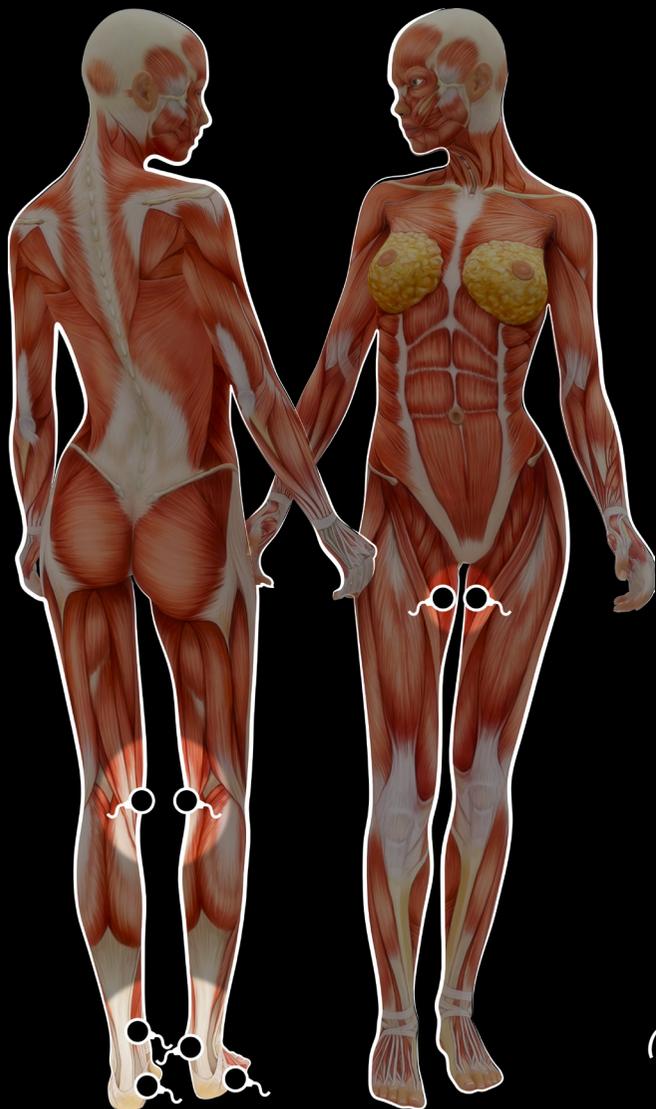


TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	STATICO					
MINUTI TOTALI	30					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
<ul style="list-style-type: none">• volta plantare• caviglia interna• ginocchio interno• interno coscia	50	30				

INDICAZIONI:	ritenzione idrica, stasi linfatiche, gonfiore diffuso arti inferiori, gambe pesanti
OBIETTIVI:	la vibrazione migliora la circolazione linfatica con riduzione degli edemi e ristagni dei liquidi.
METODO D'USO:	posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, nei punti indicati dallo schema applicativo. A fine trattamento applicare <i>LINFODREN CREAM OIL</i> su tutta la zona trattata, con un leggero massaggio.
FREQUENZA TRATTAMENTI:	Si consiglia un ciclo di 10 trattamenti (2 a settimana) e 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:



**DRENANTE SEQUENZIALE
ANTISTRESS**

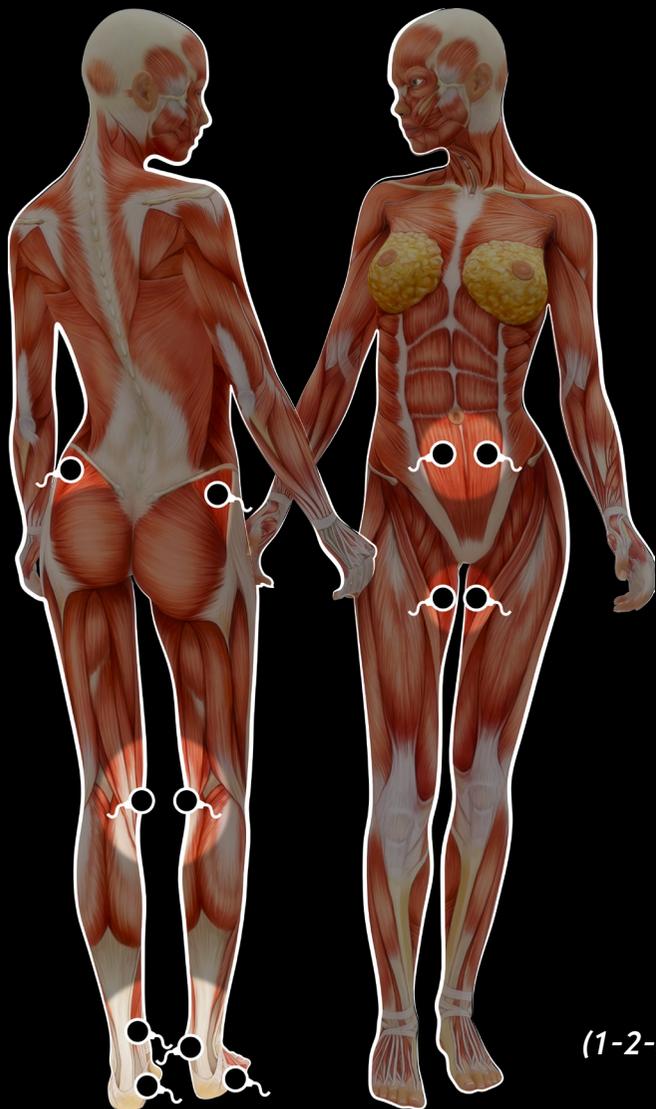

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	STATICO					
MINUTI TOTALI	40					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1-2-3)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
<ul style="list-style-type: none">• volta plantare• caviglia interna*• ginocchio interno• interno coscia • piccolo gluteo*• cisterna di pequet*	100	10	80	10	50	20
* zone alternative						

INDICAZIONI:

ritenzione idrica,
contratture muscolari dovute a postura scorretta,
stasi sanguigne e linfatiche,
stress elevato

OBIETTIVI:

la vibrazione
riduce lo stress indotto dallo stile di vita (100 Hz),
attenua le tensioni muscolari (80 Hz)
e migliora la circolazione linfatica con riduzione degli
edemi e ristagni dei liquidi (50 Hz).

METODO D'USO:

posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce
elastiche, nei punti indicati dallo schema applicativo.

A fine trattamento applicare la crema *LINFODREN
CREAM OIL* su tutta la zona trattata con un leggero
massaggio.


**FREQUENZA
TRATTAMENTI:**

Si consiglia un ciclo di 10 trattamenti (2 a settimana)
e 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:



TONIFICAZIONE

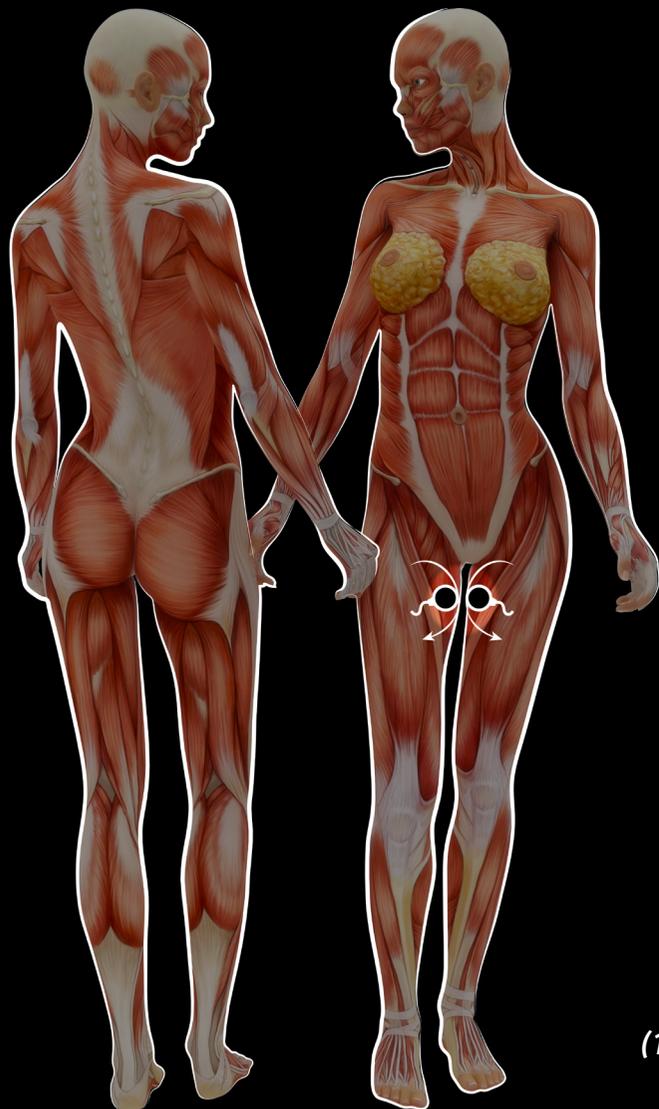

(1)

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	40					
TEMPERATURA	38°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Localizzazione personalizzata	30	40				

INDICAZIONI: rilassamento del tessuto di qualsiasi zona del corpo.

OBIETTIVI: La vibrazione tonifica e ridefinisce la muscolatura. Ricompatta gli stati di lassità cutanea.

La thermia migliora la circolazione sanguigna e la vascolarizzazione.

METODO D'USO: applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare.

Con il manipolo corpo eseguire i movimenti avanti e indietro seguendo i muscoli per 40 minuti (20 per lato) con potenza 4 secondo lo schema applicativo.

A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.


FREQUENZA TRATTAMENTI: si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana. Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo. Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





 TONIFICAZIONE STATICO

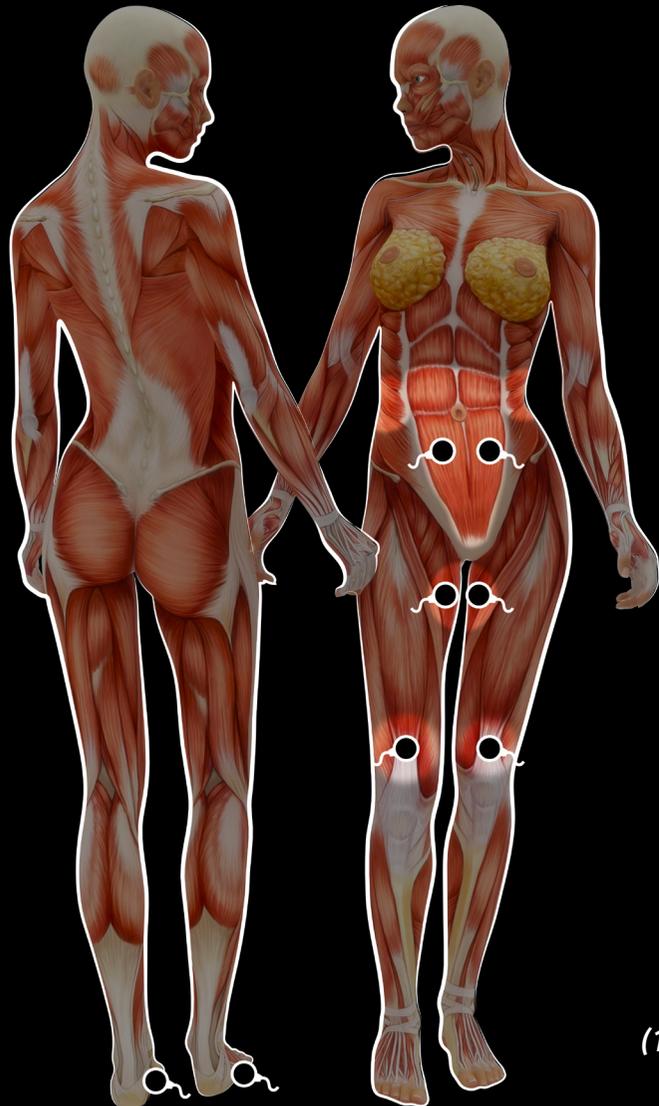

(1)

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	STATICO					
MINUTI TOTALI	30					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	Hz	Min.	Hz	Min.	Hz	Min.
Localizzazione personalizzata (schema esemplificativo)	30	30				

INDICAZIONI: rilassamento del tessuto di qualsiasi zona del corpo

OBIETTIVI: la vibrazione tonifica e ridefinisce la muscolatura. Ricompatta gli stati di lassità cutanea.

METODO D'USO: posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, sul ventre dei muscoli che devono essere tonificati. Si consiglia di concentrarli su zone specifiche, ad esempio gambe, o addome, o glutei, o braccia. A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.

FREQUENZA TRATTAMENTI: si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana. Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo. Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





ADIPE



(1)

TRATTAMENTO CORPO

TIPOLOGIA MANUALE

MINUTI TOTALI 40

TEMPERATURA 40°C

	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	Hz	Min.	Hz	Min.	Hz	Min.
posizionamento sopra ai pannicoli adiposi selezionare le zone con accumulo più evidente	45	40				

INDICAZIONI: adiposità diffusa e localizzata su tutto il corpo, come trattamento di supporto alle attività di dimagrimento

OBIETTIVI: la vibrazione favorisce l'attività aerobica della muscolatura riattivandone l'attività metabolica. Le riserve adipose localizzate vengono utilizzate come forma di energia e per questo si riducono promuovendo il dimagrimento.

La thermia favorisce l'apporto sanguigno ed aumenta l'eliminazione delle tossine.

METODO D'USO: applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare.

Con il manipolo corpo eseguire movimenti circolari e profondi, se possibile sulla plica del tessuto adiposo insistendo nelle parti più colpite dall'ineestetismo per 40 minuti (20 per lato) con potenza 4. Sull'addome procedere nel senso di scarico intestinale per facilitare la peristalsi.

A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana. Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo. Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





ADIPE

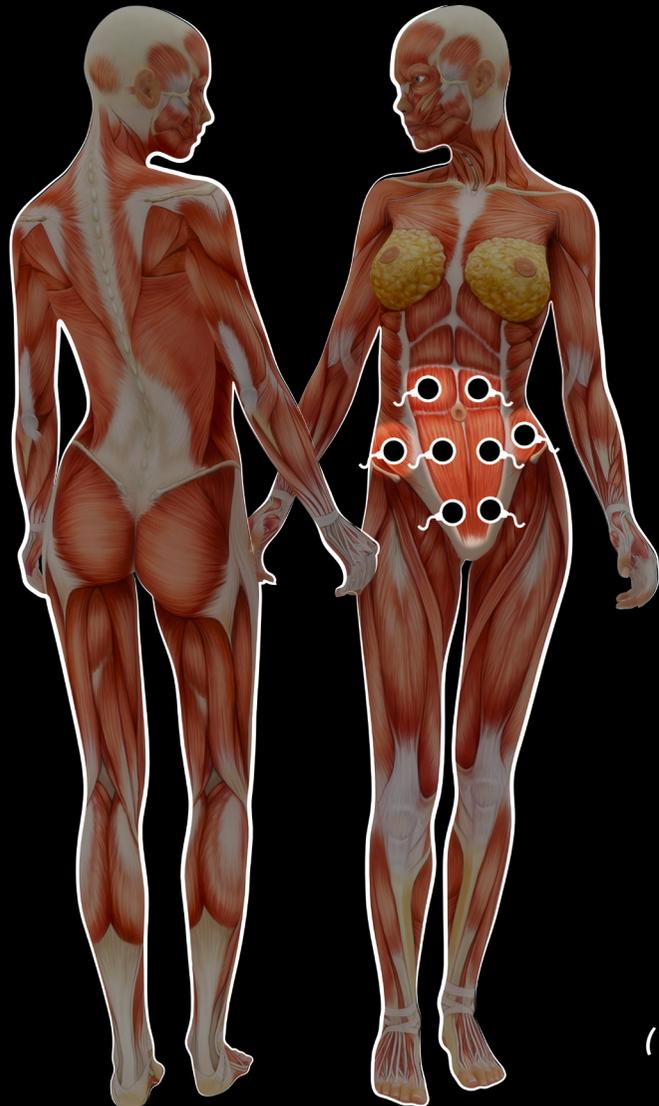

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	STATICO (+MANUALE)					
MINUTI TOTALI	40					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
posizionamento sopra ai pannicoli adiposi selezionare le zone con accumulo più evidente	100	10	45	30		

INDICAZIONI: adiposità diffusa e localizzata su tutto il corpo, come trattamento di supporto alle attività di dimagrimento

OBIETTIVI: la vibrazione favorisce l'attività aerobica della muscolatura riattivandone l'attività metabolica. Le riserve adipose localizzate vengono utilizzate come forma di energia e per questo si riducono promuovendo il dimagrimento.

METODO D'USO: posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, sugli accumuli adiposi. Si consiglia di concentrarli su zone specifiche, ad esempio gambe, o addome. Si consiglia l'uso manuale del trasduttore piatto sulle zone con adipe più concentrato con l'applicazione della *LINFODREN CREAM OIL*.

A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana. Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo. Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





CELLULITE

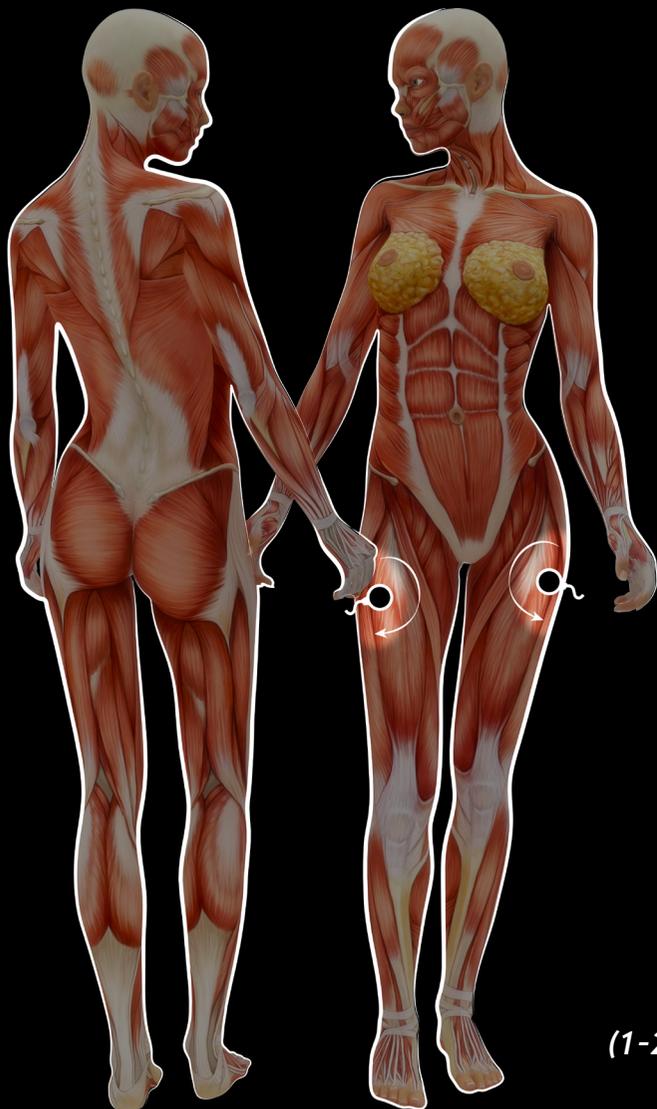

(1-2)

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	MANUALE					
MINUTI TOTALI	40					
TEMPERATURA	38°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
posizionamento sopra le zone più problematiche selezionare le zone con accumulo più evidente	50	40				

INDICAZIONI: cellulite nei vari stadi, gonfiore, stati linfatiche, post e pre-ciclo mestruale

OBIETTIVI: la vibrazione favorisce l'attività aerobica muscolare migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e l'eliminazione delle tossine.

METODO D'USO: applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare.

Con il manipolo corpo eseguire movimenti lenti e profondi su tutta la zona da trattare insistendo nelle parti più colpite dall'ineestetismo per 40 minuti (20 per lato) con potenza 4 secondo lo schema applicativo.

A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana. Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo. Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





 CELLULITE

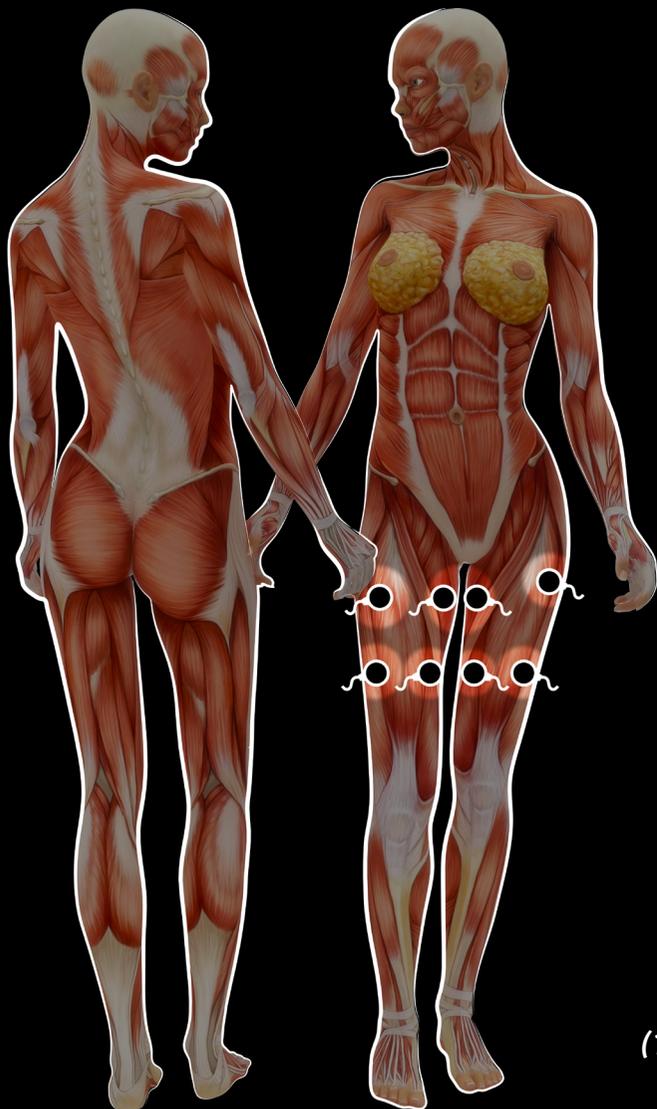

(1)

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	STATICO (+ MANUALE OPZIONALE)					
MINUTI TOTALI	40					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
Localizzazione personalizzata	50	30				

INDICAZIONI: cellulite nei vari stadi, gonfiore, stati linfatiche, post e pre-ciclo mestruale

OBIETTIVI: la vibrazione favorisce l'attività aerobica muscolare migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e l'eliminazione delle tossine.

METODO D'USO: posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, in prossimità dei punti di scarico linfatico e sugli accumuli localizzati. Si consiglia di concentrarli su zone specifiche, ad esempio gambe, o addome, o glutei.
Si consiglia l'uso manuale del trasduttore piatto sulla coulotte de chevalle con l'applicazione della *LINFODREN CREAM OIL*

A fine trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consiglia un primo ciclo di 10 sedute 2 alla settimana.
Effettuare un nuovo check up per valutare se necessario un secondo ciclo.
Infine procedere con 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:





SENO

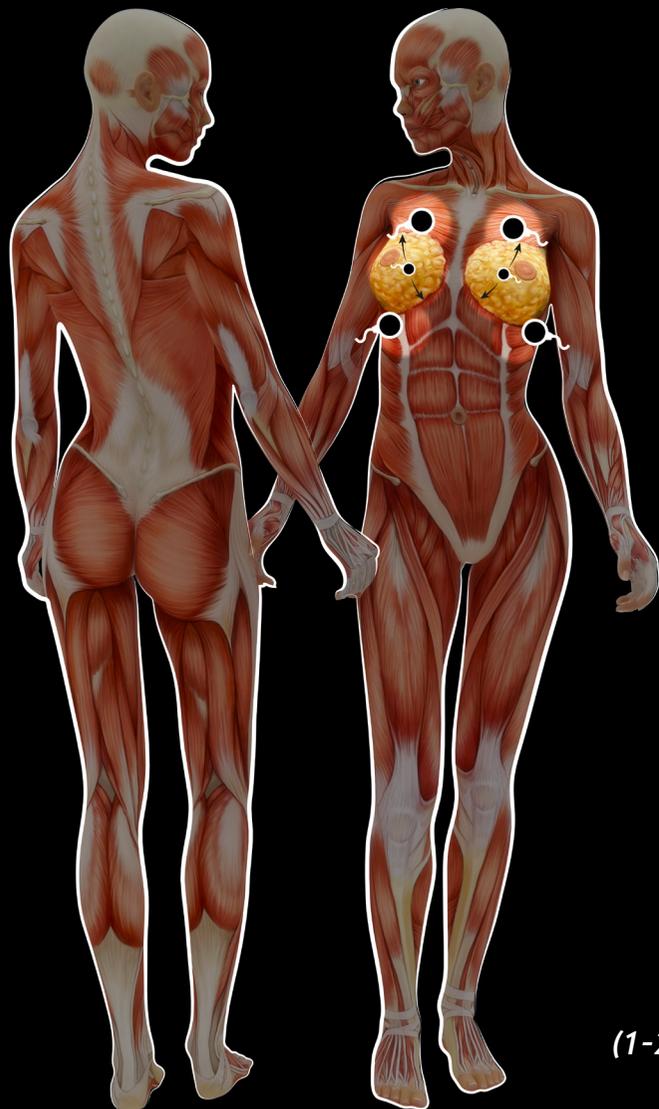

(1-2)

TRATTAMENTO CORPO

TIPOLOGIA MANUALE

MINUTI TOTALI 40

TEMPERATURA 36°C

	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1)	Hz	Min.	Hz	Min.	Hz	Min.
• mammella	100	10	30	30		

INDICAZIONI: rilassamento del seno, rughe, e rilassamento del décolleté

OBIETTIVI: La vibrazione tonifica i muscoli pettorali, ricompatta il tessuto della mammella e attenua le rughe del décolleté.
La Thermia favorisce un miglior apporto sanguigno.

METODO D'USO: detergere la parte da trattare con il latte detergente *SOFT TOUCH*.

Applicare siero *HYALU DOUBLE SERUM* su seno e décolleté fino a totale assorbimento.

FASE 1: con i trasduttori ultra piccoli eseguire movimenti circolari su tutta la mammella con una potenza 1-3.

Applicare il siero *11 BIO OIL* su tutta la parte da trattare.


FASE 2: posizionare i trasduttori, fissandoli con le fasce elastiche, nei punti indicati dallo schema applicativo per 20 minuti.

Mantenere il livello di potenza tra 2-3.

A fine trattamento applicare la *FILLER BIO-INTELLIGENT CREAM* su tutta la zona trattata con leggero massaggio.


FREQUENZA TRATTAMENTI: Si consiglia un ciclo di 8-10 trattamenti (2 a settimana) e 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:

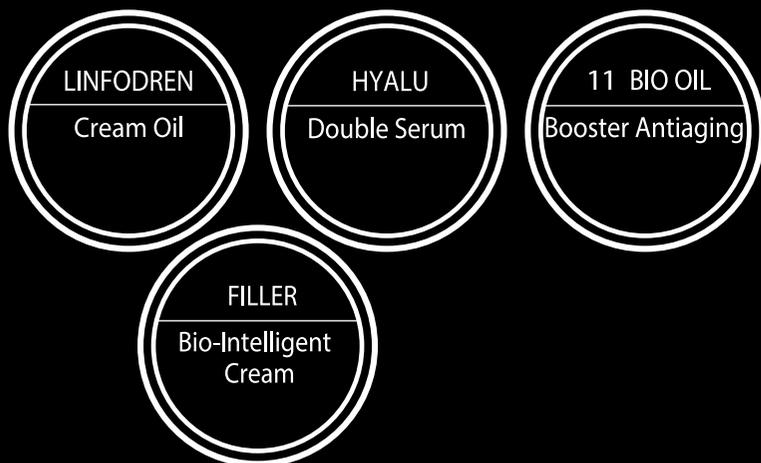



BENESSERE

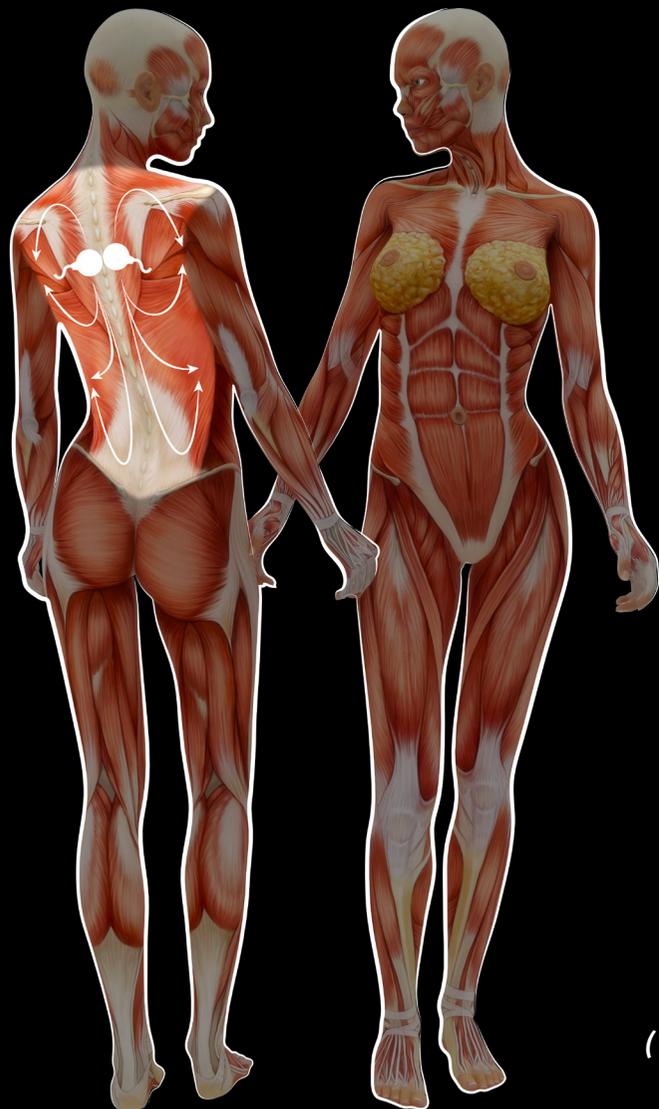

TRATTAMENTO	CORPO					
TIPOLOGIA	MANUALE + STATICO					
MINUTI TOTALI	25					
TEMPERATURA	36°C					
	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Zone (1) manuale + statico	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>	<i>Hz</i>	<i>Min.</i>
MANUALE massaggio schiena con ultrapiatte	80	25				

INDICAZIONI: tensioni localizzate o diffuse dell'apparato muscolare (dovute alla sedentarietà o alla postura), preparazione di una seduta di massaggio

OBIETTIVI: la vibrazione riequilibra e distende i muscoli posturali. Migliora il benessere fisico e mentale globale.
La thermia favorisce un miglior apporto sanguigno e induce un rilassamento dei tessuti e dei muscoli contratti.


METODO D'USO: applicare *LINFODREN CREAM OIL* su tutta la zona da trattare.
Con il manipolo corpo eseguire movimenti lenti non profondi sulla parte contratta.
Scaricare sempre nel linfonodo ascellare o nella zona renale.
Insistere nelle zone maggiormente contratte con movimenti dolci fino a percepire una riduzione della tensione per 30 minuti con potenza 3-4.

Al termine del trattamento applicare *LINFODREN CREAM OIL* con leggeri sfioramenti sulla parte trattata fino a completo assorbimento.

FREQUENZA TRATTAMENTI: si consigliano 2-3 trattamenti intensivi nella prima settimana, possibilmente consecutivi per poi passare a 1-2 alla settimana a seconda della gravità del sintomo.
Si consigliano 1 trattamento ogni 2 settimane e 1 seduta di mantenimento al mese.

PRODOTTI:



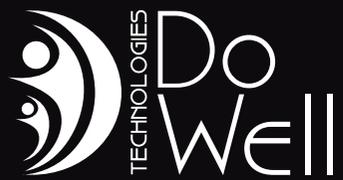

Via Grumo 10- Centro GTL
Gravesano, CH 6929
info@dowelltechnologies.ch
Tel: +41 91 22 55 283
Fax: +41 91 22 55 283
Mob: +41 76 608 88 25
Mob.IT: +39 348 770 10 21

www.vibra-beauty.com

